


Bremsur

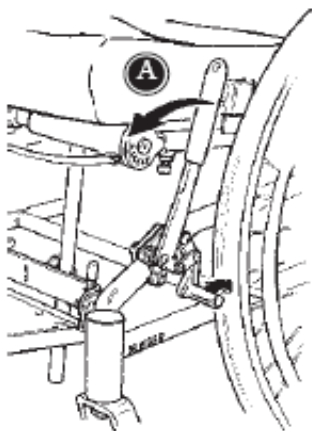

Ýtið á handfang (A) fram á við og stólinn læsist. Ýtið handfangi til baka til að losa stólinn úr bremsu.

Hreinsun og viðhald

Til að tryggja góða endingu og gott útlit á stólnum er reglulegt viðhald og þrif nauðsynlegt. Bæði á ramma og sæti.

Óhreinindi úr sætis og bakpúða má þvo 40°. Einnig má hreinsa minni óhreinindi með með volgu vatni og láta þorna.

Notið ekki bleykiefni — spritt.

Ef óhreinindir eru föst— strjúkið með mjúkum bursta

Rammann þarf að þrifa reglulega með “non-abrasive” hreinsiefni og bóna síðan með “non-abrasive” bílavaxi

Gott viðhald = góð ending !

R82 

R82 í Danmörku er leiðandi í framleiðslu hjálpertækja. Þeir sérhæfa sig í barna- hjálpertækjum og bjóða eingöngu tæki í háum gæðaflokki.



panther™




Notkunarleiðbeiningar

Vinkill á setu




Ýtið niður pedalanum (A) undir sæti og stillið vinkil.

Veltivörn

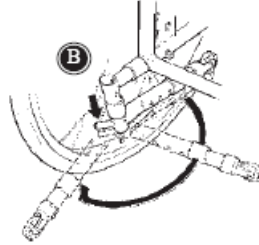


Ýtið niður á veltivörn eins og sýnt er á myndinni (B) og snúið í 180°.

Hæðarstillanlegir armar

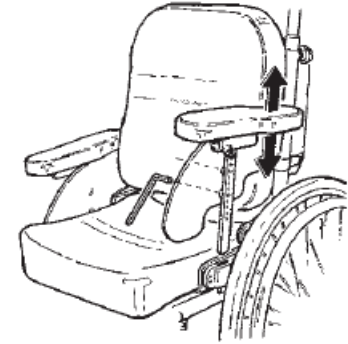


Til að hæðarstilla arma þarf að færa hliðarplötur upp/niður armstangirnar. Vinsamlegast notið 4 mm sexkant.

Fótstuðningur:


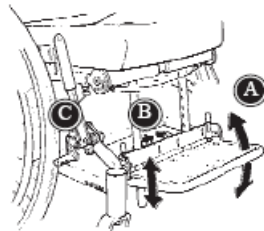


Til að vinkilstilla fótplötu snúið skrufum (A).

Til að hæðarstilla fótplötu ýtið á handföng (B)

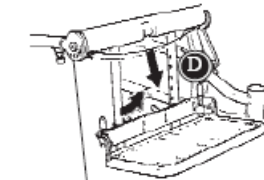


Til að lyfta fótplötunni upp tugið í band sem er staðsett undir sæti (D).

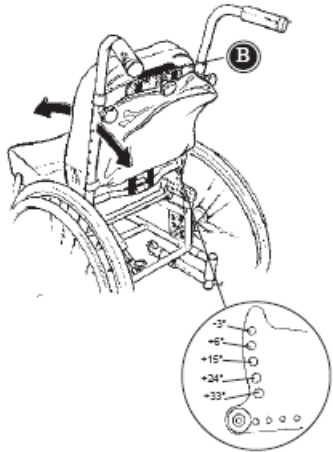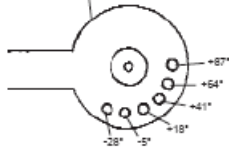

Vinkilstilling baks: Togið í band (B) sem er staðsett fyrir aftan bakið og stillið bakið í æskilega stöðu með hinni hendinni.

Hraðlosun dekkja

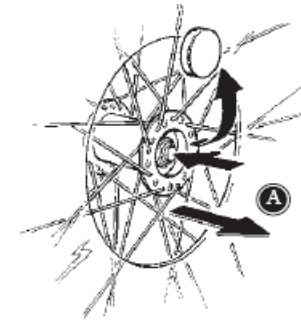

Fjarlægið hulstrið og ýtið inn á takkann og takið dekkið af.

Til að setja dekkið á ýtið takkanum inn og setjið dekkið á og kannið hvort það sitji ekki örugglega fast. Setjið hulstrið aftur á.