



Wendy lett snúningslak frá Romedic

Wendy lett er snúningslak í tveimur hlutum ætlað til að auðvelda snúning til hliðanna í rúmi.

Wendy lett hentar 90 cm breiðum rúmum. Annað lakið er með sleipum satín miðjuhluta og bómullarefni til hliðanna, festið þann hluta utan um dýnuna. Leggið hitt lakið yfir og gætið þess að rendurnar á lökunum liggi eins. Efnið er ofið á þann veg að það rennur aðeins í eina átt.

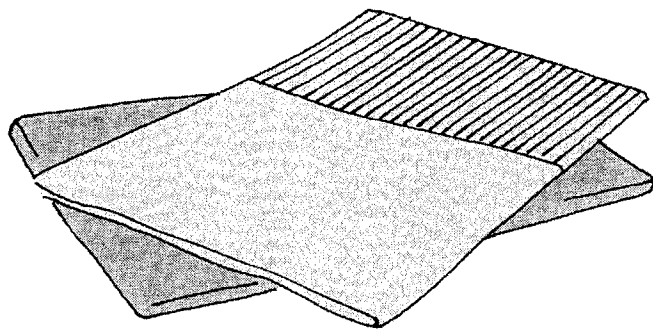

CE

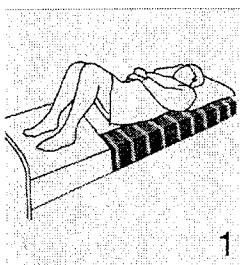


1

Staðsetning Wendy lett.

Satín hlutinn á að vera í miðju rúmsins. Bómullarkantarnir koma í veg fyrir að notandi renni til þegar sest er á rúmstokkinn.

1. Ef notandi getur snúið sér með lítilli hjálp getur hentað að nota aðeins neðri hlutann.


2. Þegar bæði lökín eru notuð saman getur notandi snúið sér sjálfur og rennur ekki neðar í rúmið þó höfðalag sé hækkað. Þurfi notandi hjálp við snúning notar aðstoðarmaður yfirlakið.

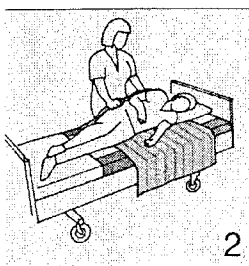

2

Efni: Poliester, bómull og satín

Má þvo við 60-80 c° í þvottavél og þurrka við lágt hitastig í þurrkara. Notið ekki mýkingarefni

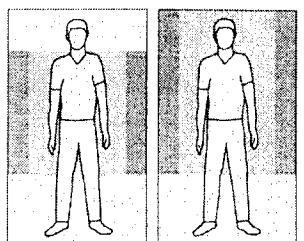

100x200

140x200