

# Owner's manual

Balder Junior



Balder Finesse



Balder Liberty





## Fjöldi farþega

Allir Balder hjólastólar er gerðir fyrir inn notanda.

Það má aldrei taka farþega með sér í stólinn eða standandi utan á honum.



**Það má ekki fara í dýpra vatn en 7 cm það getur skemt rafkerfið**

---

## Virgni

Balder hjólastólar eru rafknúnir og er þeim stjórnað með stýripinna og rofum.



### Viðvörðun

**Það má ekki taka í sundur hluti sem hafa áhrif á stjórnun eða virkni stólsins .  
Hafið samband við þjónustuaðila ef þú þarft hjálp.**

Myndirn hér að neðan sýnir Balder Finesse, en uppbygging Balder Junior og Balder Liberty er sú sama. Balder Finesse og Balder Junior eru framhóladrifnir, en Balder Liberty er afturhjóladrifin



Figure 1 Yfirlitsmynd af Balder hjólastól

Key:	
1. Höfuð stuðningur	5. Kálfapúðar
2. Bak	6. Fótplötur
3. Joystick	7. Rafgeymar (eru staðsettir undir hlífl)
4. Sæti	8. Armar














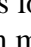
## Joystick

Balder hjólastólar koma með stýriopinna sem er hægt að forrita. Stýripinninn kemur forritaður frá framleiðanda miðað við búnað hvers stóls.

### Dolphin stýripinni



Figure 2 - Dolphin joystick

1	Gaumljós  (grønn)	9	Fótafjalir halli 
2	Rafgeymaljós *	10	Halla sæti 
3	Aðalrofi 	11	Skinjari fyrir lykil 
4	Hægra stefnuljós (aukahlutur) 	12	Lengdar stilling á fótafjöllum 
5	Skjár 	13	Bak halli 
6	Flauta 	14	Viðvörðunar ljós (aukahlutur) 
7	Ljós (aukahlutur) 	15	Velja prógramm 
8	Hæka/lækka sæti 	16	Vinstra stefnuljós (aukahlutur) 

\*) 3 rauð, 4 gul og 3 græn ljós loga þegar rafgeymarnir eru full hlaðnir. Þau slökna síðan eftir því sem minnar á rafgeymum.

### 3.2.1.2. Joystick G90



Mynd 3 – Stýripinni G90

1	Gaumljós		11	Halla fótafjöllum	
2	2 Rafgeymaljós *		12	Halla sæti	
3	Aðalrofi		13	Skinjari fyrir lykil	
4	Hægra stefnuljós (aukahlutur)		14	Lengja/stytta fótafjalir	
5	Skjár		15	Bak halli	
6	Flauta		16	Viðvörðunarljós (aukahlutur)	
7	Ljós (aukahlutur)		17	Velja Prógram	
8	Ljós (aukahlutur)		18	Vinstra Stefnuljós	
9	Ljósa stillingar (aukahlutur)		19	Velja milli kerfa (Ljós, sætishreyfingar, ECU)	
10	Hækka/lækka sæti				

\*) 2 rauð, 2 gul og 2 græn ljós loga þegar rafgeymarnir eru full hlaðnir. Þau slokna síðan eitt af öðru eftir því sem minskar á rafgeymunum.

**Stand up :**

1. Halla baki í þægilega byrjunarstöðu
2. Setja fótafjalir í byrjunarstöðu.
3. Hækka sæti upp þar til gulaljósið kveiknar
4. Festa hnépúða með lásnum mynd 2a og 2b (1).



5. Setja brjóst belti sjá mynd 3



6. Halda niðri standupp takkanum 4 á ákveðnum stað í ferlinu stoppar lyftan með stuðningshjólin fara niður þá kveiknar grænaljósið



**Fara til baka setstöðu**

1. Halda niðri takka (7) til að fara aftur niður í byrjunarstöðu.





## Hleðsla


Það er í lagi að skilja hleðslutækið eftir í sambandi við hjólastólin.  
Það tryggir að rafgeymarinir séu fullhlaðnir og viðheldur hleðslunni.

### Þega á að hlaða stólinn:

1. Slökkvið á stólnum.
2. Tengid hleðslutækið við stólinn tengi (1)
3. Setjuð hleðslutækið í samband við rafmagn.

### Þegar stólinn er fullhlaðin:

1. Takið hleðslutækið úr sambandi við rafmagn.
2. Aftengið tækið frá stólnum (1).

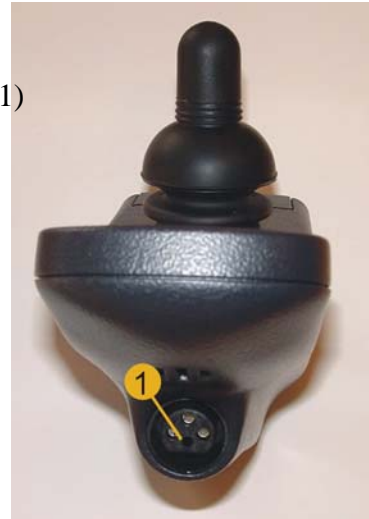

## Geymsla

ATH það má ekki geyma stólinn lengi með óhlaðna geyma.

Ef það á að geyma stólinn í lengri tíma, þurfa rafgeymarinir að vera fullhlaðnir, síðan á að hlaða stólinn einusinni í mánuði. Það verður að geyma Balder hjólastóla á þurrum og hreinum stað innandyra. Best er að ategja geymana ef stóllinn er geymdur í langan tíma.