



Koppur - festingar

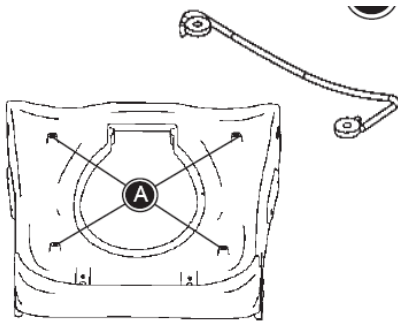

Festingar fyrir koppinn eru festar með 4 mm skrúfum undir sætinu (A)
Koppinum er svo rennt undir að aftanverðu.

Vesti / krossvesti

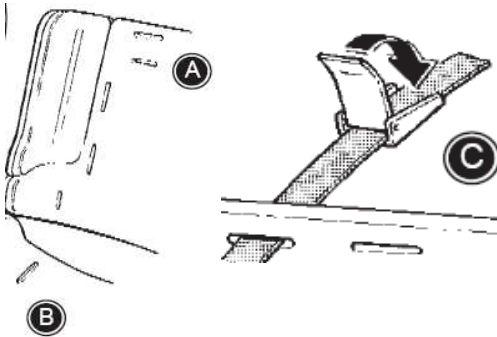

Böndin fyrir axlir eru settar í gegnum götin á efri bakveiningunni (A)
Böndin fyrir mjaðmir eru settar í gegnum götin á sætiseiningunni (B)
Böndin eru fest með smellulás (C)

Bls. 5

Hreinsun og viðhald

Hægt er að taka bólstrun af bak- og sætiseiningu auðveldlega af til að þrifa.

Ekki má nota klór til að þrifa

Nota skal almenn hreingerningarefni eins og t.d sulfo, Ajax o.s.fv.

Til að fjarlægja kalkbletti er hægt að nota ediksýru en skola skal vel á eftir í 10-15 mín með hreinu vatni.

Bls. 6


Flamingo Salernis- og sturtustólar



Bls. 1

Notkunarleiðbeiningar

Flamingo - tekin í notkun:

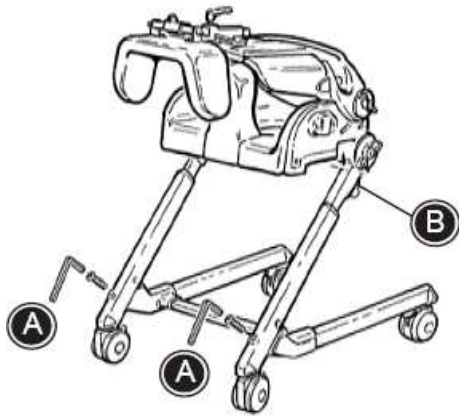


Rammanum er lyft upp og skrúfur **A** eru festar.

Togað er í grænu öryggiskúlurnar sem eru staðsettar undir sætinu **B** og sætið er stillt í óskaðan vinkel.

Flamingo er núna tilbúinn til notkunar.


Vinkilstilling á sæti og baki.

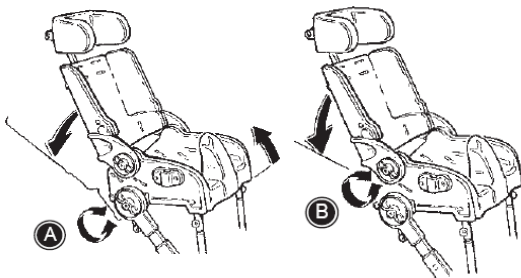

- 1) Til að vinkilstilla sæt - snúa skal gripfestingunni **A** sitt hvoru megin og stilla.
- 2) Til að vinkilstilla bak - snúa skal gripfestingunum **B** sitt hvoru megin og stilla.


Mjög mikilvægt að herða báðu megin

Hæðarstilling

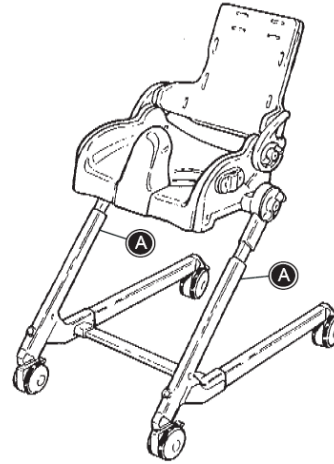


Skrúfurnar sem eru staðsettar aftan á stölinu (**A**) eru skrúfaðar úr. Sætiseining og rammi er togaður upp í þá hæð sem passar. Skrúfurnar eru svo festar aftur.

Stillingar á fótplötum

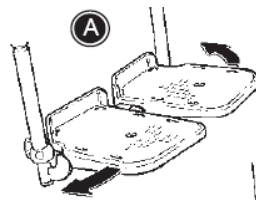


Hægt er að stilla fótplöturnar framávið eða vinkilstilla þær til hliðar (**A**)

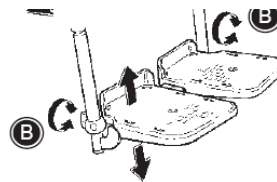


Hægt er að hæðarstillast fótplöturnar hverja fyrir sig með því að Losa um fingurskrúfu (**B**) á stönginni.

Vinkilstilling á fótahvílum

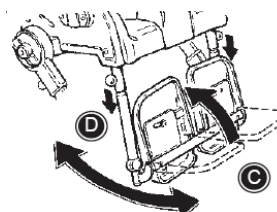

Lyftið fótplötum upp (**C**)
Togið grænu öryggiskúlurnar (**D**) niður og þá er hægt að vinkilstilla fótahvílurnar.

Hliðarstuðningur

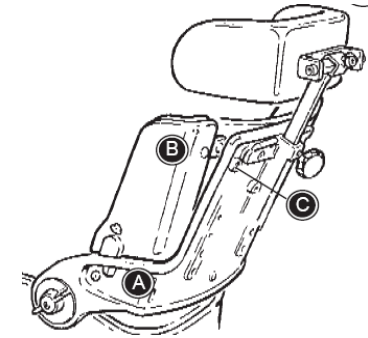


Staðsetjið hliðarstuðninginn í gatið (**A**)

Hliðarstuðningum er ýtt á sinn stað við bakeinin-guna (**B**)

Hliðarstuðningurinn er festur með skrúfu (**C**)

Armstuðningur / Borð

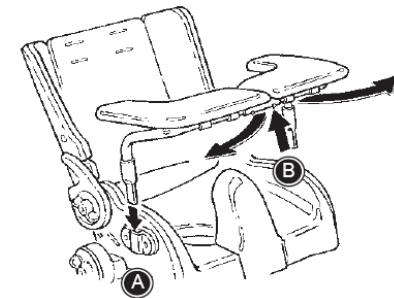

Armstuðningurinn / Borðið er sett í festingarnar á hvorri hlið (**A**)

Til að fella armana / borðið upp þarf að opna festinguna (**B**)