

## Flutningssegl frá Guldmann



### Tegundir

1. Efnið í seglunum er polyester þekkt fyrir styrk heldur lögun vel og óhreinindi loða illa við efnið.
2. Bólstrun undir lærum, eykur vellíðan notanda.
3. Lykkja til að hengja seglið upp.
4. Upplýsingar um seglið.
5. Segl sem ná upp að mitti eru með bólstrun við bak.
6. Festing fyrir bönd til að gefa betra grip fyrir aðstoðarmann.
7. Liturinn á röndinni segir til um gerð seglsins.
8. Öll Basic segl eru með vasa til að auðvelda aðstoðarmanni að koma seglinu fyrir.
9. Margar stærðir eru í boði, mikilvægt er að velja rétta stærð. Sjá töflu.
10. Hámarksþyngd notanda er 200 kg
11. Þvottur við 85°C í þvottavél má þurrka í þurrkara.

### Micro plus

Hentar notendum með höfuðstjórn, en með skertan vöðvastyrk. Notað þegar flutt er úr sitjandi eða háfliggjandi stöðu. Þegar notandi er háfliggjandi ætti að nota höfuðstuðning á seglið.

### Basic

Hentar notendum með höfuðstjórn og með eða/án stjórn á líkama. Notið þegar lyft er úr sitjandi hálsitjandi stöðu ss. stól eða rúm með hækkun við bak.

### Basic Low.

Hentar notendum sem hafa stjórn á höfði/líkama. Notað til að lyfta úr sitjandi stöðu.

### Basic High.

Hentar notendum með litla stjórn á höfði og líkama. Notað þegar lyft er úr liggjandi eða sitjandi stöðu.

Basic seglin er hægt að fá úr gegndræpu neti sem nota má í bað og sturtu, þau eru ekki bólstruð.

Mælið sethæð(H) og setbreidd (W) til að finna rétta stærð af segli.

Framleiðandi: **Guldmann**  
[www.guldmann.com](http://www.guldmann.com)



	Breidd	Hæð
Kids 4-6	25-30	45-60
Kids 6-10	28-35	55-70
Kids 10-14	33-38	68-80
XS	33-37	75-82
S	36-40	80-87
M	39-43	85-92
L	42-43	90-97
XL	45-49	95-102
XXL	48-52	95-102
XXXL	54-58	95-102