

---

## Notendaleiðbeiningar

*Vinsamlegast lesið leiðbeiningarnar áður en varan er tekin í notkun.*

### Notkun

Snúningsdiskur notast til að léttu fólki flutninga. Hægt er að nota diskinn með eða án aðstoðarmanna. Diskurinn léttir snúning fyrir viðkomandi og auðveldar alla hjálpa.


Notandinn hefur færðunar á disknum. Hann stendur upp eða fær aðstoð til þess, þá er hægt að snúa notandanum þannig að hann geti sest aftur.

### Þrif

Þurrkið af með rökum, mjúkum klút og notið milda sápu. Þrífið diskinn eingöngu að utan. Notið ekki klór eða sterk efni og má ekki setja í þvottavél.

### ATH

- Hámarksþyngd 150 kg.
- Notið snúningisdiskinn eingöngu eins og fram kemur á blaðinu hér að ofan.
- Látið ekki liggja í vatni.

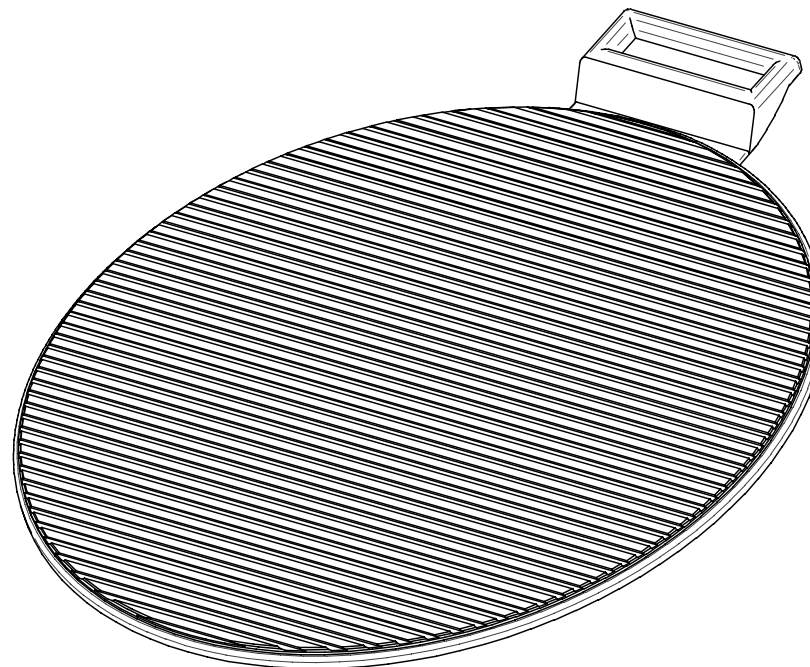

Stoð hf.  
Trönuhraun 8, 220 Hafnarfjörður  
Sími 565-2885 [www.stod.is](http://www.stod.is)

---