



## **Maestria og Aventio Göngugrindur án hjóla frá Invacare Notendaleiðbeiningar**

- Burðargeta grindarinnar er 100 kg.
- Ef grindin er skemmd eða mikið slitinn á ekki að nota hana.
- Geymið grindina ekki utandyra.
- Yfirfarið stöðuleika grindarinnar, festingar og gúmmí reglulega.
- Grindin er opnuð með því að taka í handföngin og færa þau til hliðar eins og hægt er. Aventio er hægt að opna meira með því að þrýsta á plastringinn í miðjunni.
- Til að leggja grindina saman þrýstið á plastringinn í miðjunni og ýtið hliðunum saman.
- Til að hækka grindina ýtið á hnappinn á fætinum og dragið í æskilega hæð. Stillið alla fæturna í sömu hæð.
- Notið grindina á hörðu og sléttu gólfi, ekki nota grindina í stiga.
- Þrífið grindina með rökum, mjúkum klút og notið milda sápu.