

Handicare

Sturtukollur

Notendaleiðbeiningar

Trönuhrauni 8
220 Hafnarfjörður
Sími 565 2885 / Fax 565 1423
stod@stod.is / www.stod.is

Notendaleiðbeiningar Sturtukollur

Vinsamlegast lesið leiðbeiningarnar áður en varna er tekin í notkun.

Tilgangur

Notendaleiðbeiningar þessar eiga við um Hringlaga sturtustól til notkunar á baðherbergjum. Hægt er að nota stólinn sem sæti við vask og einnig sem sæti í sturtu. Stóllinn er mjög hentugur í litlu rími.

Stillingar – sjá teikningu


Sturtustóllinn hefur 10 mögulegar hæðarstillingar. Takið splittið úr fótum stólsins eitt í einu og veljið ákjósanlega hæð. Athugið að stilla allar fjórar fætur í sömu hæð og setjið splittin aftur í rörin. (ATH splittin verða að ganga alveg inn).

Viðhald og þrif

Vinsamlegast þurrkið eftir notkun.

ATH:

- Hámarksþyngd: 150 kg.
- Notið stólinn eingöngu eins og fram kemur í liðnum „tilgangur“ hér að ofan.
- Standið ekki á stólnum !
- Dragið ekki eða ýtið stólnum eftir gólfinu þegar setið er á honum.
- Aðgætið að splittin séu í réttri stöðu áður en stóllinn er notaður.
- Aðgætið ástand splittanna reglulega til að koma í veg fyrir slys.
- Notið ekki stólinn ef fótur/fætur hans eru bognir.

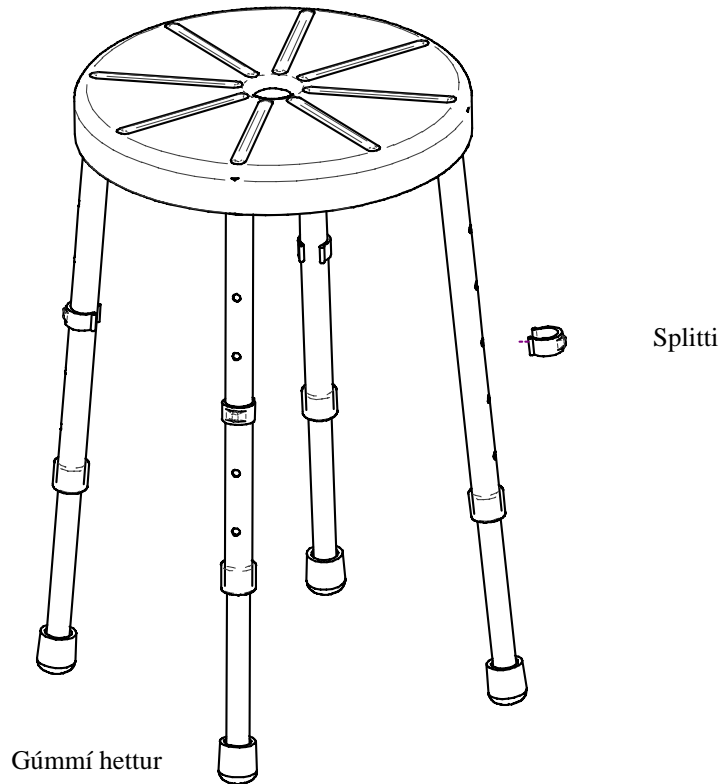

Trönuhraun 8, 220 Hafnarfjörður
Sími 565-2885 www.stod.is

