


Sabina 200

Notenda handbók

Íslenska

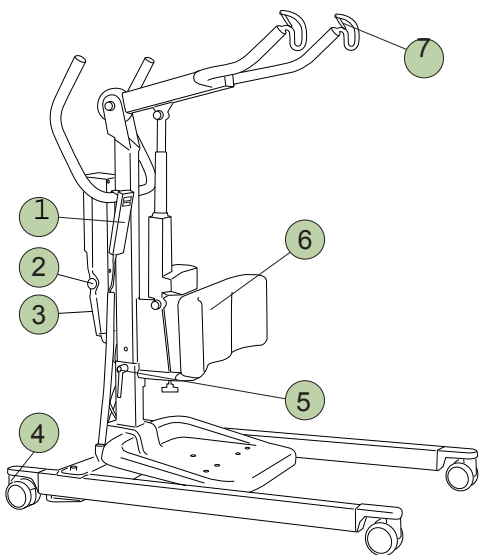

1 Stjórtæki




- ↑ Upp
- ↓ Niður
- ⊖ Breikka hjólastell
- ⊕ Mjókka hjólastell
- ⓐ Tækið þarfnast hleðslu


2 Neyðarstop

Virkjað:


Tekið af:

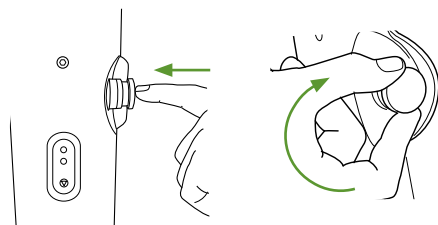

3 Neyðarslökun

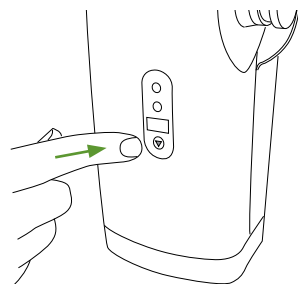

4 Setja hjól í bremsu

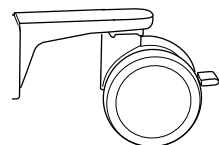

↑ Losa bremsu
↓ setja bremsu á

Stillingar

5




Hæð sjúklings

1. < 170 cm / 67 inch.
2. 160-190 cm / 63-75 inch.
3. > 180 cm / 71 inch.




6


Fót stuðningur

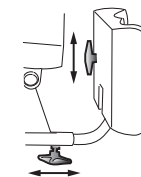

Öryggisrás

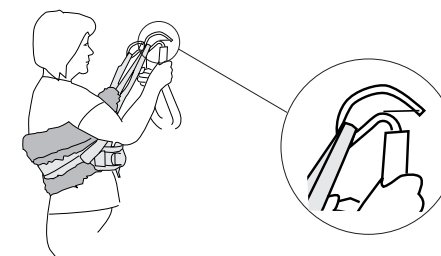

Hleðsla

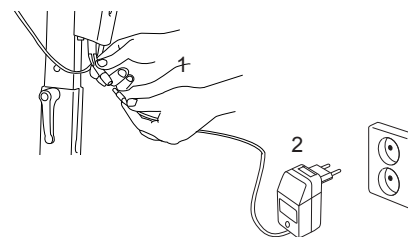

- Hlaðið lyftarann reglulega eftir notkun.
- Það er ekki hægt að nota lyftarann á meðan hann er í hleðslu.
- Ekki virkja neyðarrofa meðan á hleðslu stendur.

Vinnuvistfræði

- Ekki lyfta með höndum, látið lyftarann vinna verkið.
- Verið róleg. Vinnið róleg og skipulega.
- Ekki ofreyna bakið! Vinnið í uppréttri stöðu og verið bein í baki.
- Stíllið rúmið í rétta vinnuhæð.
- Minnkið vogaraflið og standið nálágt einstaklingnum og lyftunni.

Þvottur

Þrifið lyftuna með rakri tusku og sóttþreinsandi vökva.

Einföld bilanaleit

Athugið hvort:

- neyðarrofi sé virkjaður
- vanti hleðslu
- er stjórtækið rétt tengt.

Aðrar handbækur

Aðrar handbækur um Liko lyftara og segl er hægt nálgast á vef Liko www.liko.com.

© Copyright Liko AB



Öryggis leiðbeiningar

- Lesið leiðbeiningarnar áður en lyftan eða fylgihlutir hennar eru notaðir.
 - Skipuleggið lyftingarferlið vel.
 - Verið viss um að lykkjurnar á seglinu sé rétt festar við krókana á herðatrénu áður en einstaklingnum er lyft.
 - **Hámarks þyngd: 160 kg (350 lbs).**
- Til að lyfta hámarksþyngd þarf að passa að allir aukahlutir sem notaðir eru séu fyrir sömu eða meiri þyngd.

Áriðandi

Þessi flýti leiðbeiningar koma ekki í staðin fyrir notenda handbókina sem hægt er að nálgast Vef Liko. www.liko.com.

7EN155502-01



A Hill-Rom Company

www.liko.com

Liko Distributor in UK:

Liko (UK) Ltd.
Phone: +44 (0) 1453 827272
Fax: +44 (0) 1453 828844
info@liko.co.uk

2National Distributor in USA and Canada:

Liko North America
Phone: 508-553-3993, 1-888-545-6671
Fax: 508-528-6642
info@liko.com