


# Sabina II


Flýti handbók

Íslenska

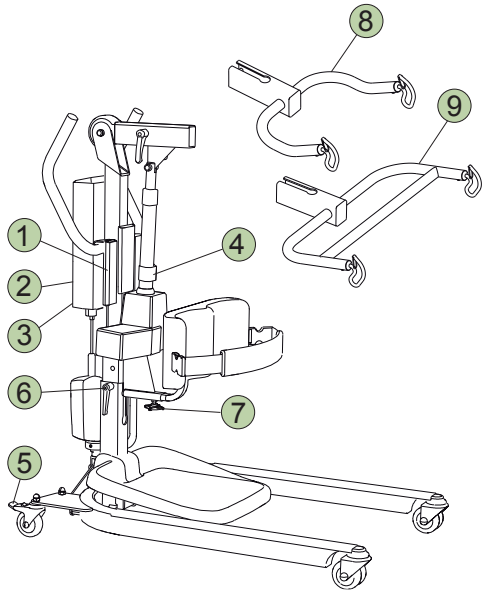

## 1 Stjórnæki


Sabina II EE Sabina II EM

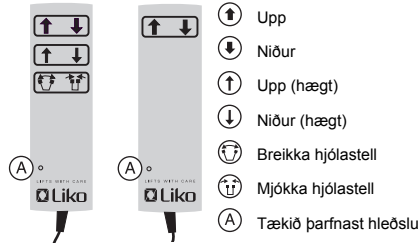


- ⬆ Upp
- ⬇ Niður
- ⬆ Upp (hægt)
- ⬇ Niður (hægt)
- ⌚ Breikka hjólastell
- ⌚ Mjókka hjólastell
- Ⓐ Tækið þarfnast hleðslu

## 2 Neyðarstop


Virkjað:

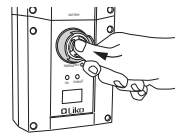

Tekið af:

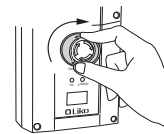


## 3 Neyðar rofar fyrir hífingu og slökun með rafmagni

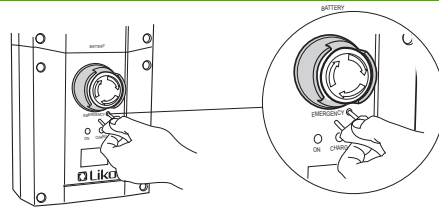


⚠ Notið ekki oddhvassan hlut til að ýta á rofana því það getur valdið skemmdum á stjórnboxinu!


## 4 Handvirk neyðar slökun

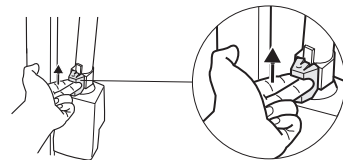

## 5 Setja hjól í bremsu

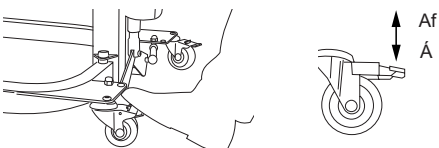


## Stillingar

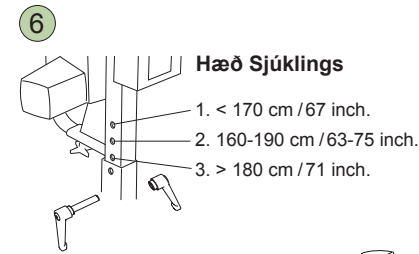

Hæð Sjúklings


- 1. < 170 cm / 67 inch.
- 2. 160-190 cm / 63-75 inch.
- 3. > 180 cm / 71 inch.

## 7 Fót stuðningur

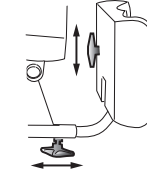


## Valkostir

### 8 Herðatré 350

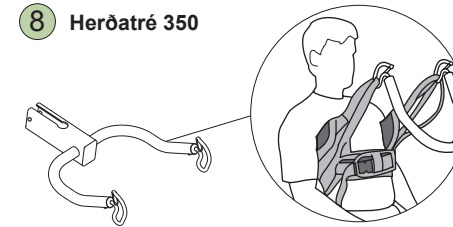

### 9 Hæginda herðatré

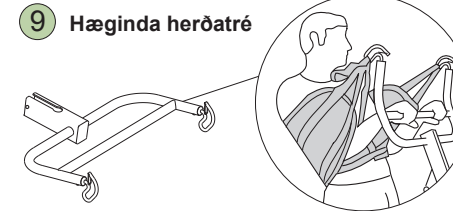

## Hleðsla



Hlaðið strax!



Full hlaðin

- Hlaðið lyftarnn reglulega eftir notkun
- Það er ekki hægt að nota lyftarann á meðan hann er í hleðslu
- **Ekki virkja neyðarrofan á meðan hlaðið er**

## Vinnuvistfræði

Ekki lyfta með höndum, látið lyftarann vinna verkið

- Vinnið rólega og skipulega.
- Ekki ofreyna bakið! Vinnið í uppréttri stöðu og verið bein í baki.
- Minnkið vogaraflið og standið nálægt einstaklingnum og lyftunni.

## Þvottur

Þrifið lyftarann með rakri tusku og sóttþreinsandi vökva eins oft og þurfa þykir.

## Bilanaleit

Athugið eftirfarandi:

- Er neyðarstop rofin virkjaður. (sjá 2)
- Eru rafgeymarnir full hlaðnir.
- Er stjórnækið rétt tengt.

## Aðrar handbækur

Aðrar handbækur um Liko lyftara og segl er hægt að nálgast á vef Liko [www.liko.com](http://www.liko.com).

© Copyright Liko AB



## Öryggis leiðbeiningar

- Lesið leiðbeiningarnar áður en lyftan eða fylgihlutir hennar eru notaðir.
- Skipuleggið lyftingarferlið vel.
- Verið viss um að lykkjurnar á seglinu séu rétt festar við krókana á herðatrénu áður en sjúklingnum er lyft.

- Hámarks þyngd: 200 kg (440 lbs).

Til að lyfta hámarksþyngd þarf að passa að allir aukahlutir séu fyrir sömu þyngd eða meiri.

## Áríðandi!

Þessar flýti leiðbeiningar koma ekki í staðin fyrir notenda handbókina. Hana er hægt að nálgast á vef Liko [www.liko.com](http://www.liko.com).

LIFTS WITH CARE

**Liko**

[www.liko.com](http://www.liko.com)

Liko Distributor in UK:

Liko (UK) Ltd.  
Phone: +44 (0) 1453 827272  
Fax: +44 (0) 1453 828844  
info@liko.co.uk

National Distributor in USA and Canada:

Liko North America  
Phone: 508-553-3993, 1-888-545-6671  
Fax: 508-528-6642  
info@liko.com