


Notendahandbók fyrir
HENRY®
stærð I, II og III

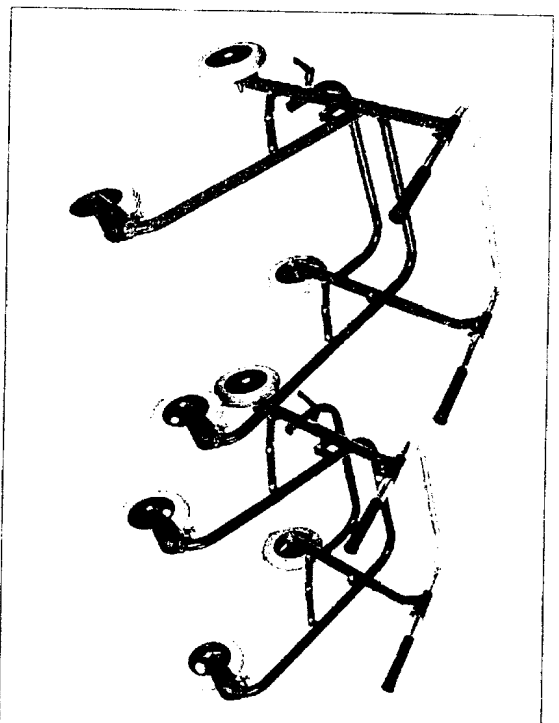

H. MEYLAND-SMITH A/S



Handle bar	handföng	
Upper tube	Efra rör	
Front wheel bar	framhjólástöng	
Allen key	Sexkantur	
Rear wheel bar	afturhjólástöng	
Rear wheel tube	Afturhjólarör	
Ruler	Stillir	
Spanner grip	Hersluhandfang	
Locking arm	Læsiarmur	
Rear wheel	Afturhjóli	
Swivel lock	Snúningsslás	
Swivelling front wheel	Framhjól sem snýst	

1. mynd

Kynning

Í þessum notkunarleiddæiningum er að finna upplýsingar um hvernig á að setja saman og stilla HENRY®, hvernig viðhaldi er háttað, hvers ber að gæta og annað sem máli skiptir.

HENRY® er viðsnúin göngugrind. Með því er átt við að notandinn yfir henni ekki á undan sér heldur dregur hana á eftir sér. Þannig fær hann bætt aðgengi að svæðinu fyrir framan sig og getur óhindrað hreyft sig áfram. Göngugrindin stuðlar á virkan hátt að styrkingu líkamans með göngu og stöðu og hvetur þannig til eðlilegrar göngu. HENRY® hentar bæði innan- og utanhúss.

Á 1. mynd má sjá nöfn einstakra hluta HENRY® sem vísað er til í textanum.

Áður en notkun hefst

Það er nær algjörlega búið að setja HENRY® saman við afhendingu. Kannist hvort í umbúðunum er að finna eftirfarandi:

- samanbrotna grunngrind,
- handföng með samanbrotnum efri rörum.

Athugið að 5 mm sexkantur fylgir með HENRY®. Hann er að finna í plastappa öðrum megin á afturhjólástönginni (sjá 1. mynd).

Að breyta út grunngrindina:

Grunngrindin er breitt út þannig að hún er látin standa á framhjólunum og haldið er í framhjólástöngina með annarri hendi (sjá 2. mynd). Síðan er tekið í afturhjólástöngina og henni lyft svo grindin opnast. Loks þarf að læsa grindinni með því að yta læsiarminum lengra niður (sjá 3. mynd).

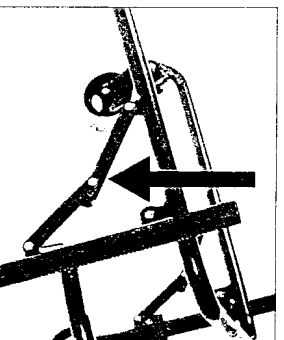
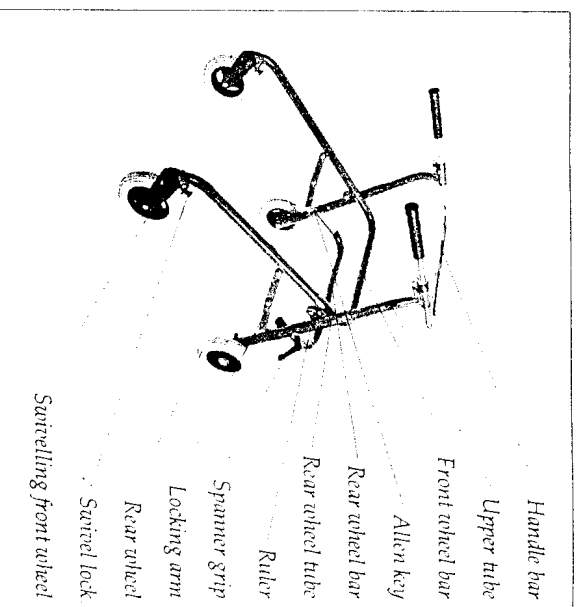


Figure 3

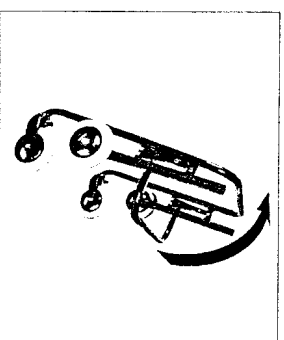


Figure 2

Að setja handföngin á:

Brettið úr efri rör og setið hersluhandföngin utan á (sjá 4. mynd). Það gæti þurft að losa skrúfumnar ofan á efri rörum (sjá 7. mynd) með sexkantinum. Hersluhandföngin eru alveg losuð af og efri rörnum komið fyrir ofan í götin efst á afturhjólarörnum

(sjá 5. mynd). Að lokum eru hersluhandföngin skrúfuð aftur á efri rörin gegnum rauf í afturhjólarörnum.

Að setja fylgihlutina á:

Lýsingu á því hvernig setja á fylgihluti á göngugrindina er að finna í kaflanum: „Að setja fylgihluti á og stilla þá rétt.“ Þetta á bæði við um þá fylgihluti sem fylgja og þá sem síðar eru keyptir.

Að stilla grunngerðina:

Hæð handfanga:

Hæð handfanga er stillt með því að losa hersluhandföngin og renna efri rörum upp eða niður á við (sjá 6. mynd). Notið merkistrikin á afturhjólarörum sem viðmið til að stilla í sömu hæð báðum megin. Herið handföngin aftur þegar rétt hæð er fengin.

Viðvörnum:

Efri rörin á HENRY® III eru merkt með gulu viðvörnumarkerki (sjá 7. mynd). Merkið sýnir hámarksútdrátt á efri rörnum, einungis efsti hluti gula viðvörnumarmiðans má sjátt. Ekki má yfirstíga þessa viðvörnum, öryggisins vegna.

Lárétt stilling á handföngum:

Hægt er að renna handföngunum fram eða aftur í rörnum með því að losa skrúfumnar tvær (sjá 8. mynd) með sexkantinum. Þegar rétt staða hefur verið fundin eru skrúfumnar hertar á ný með sexkantinum.

Snúningslás á framhjólum:

Snúningslásar eru staðalbúnaður á HENRY®. Hægt er að festa læsipinnann þannig að framhjólin geta snúist að vild (sjá 9. mynd) eða snúa honum í fjórðung úr hring þannig að hann festist í gati á framhjólinu (sjá 10. mynd).

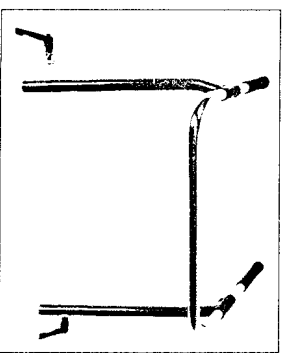


Figure 4

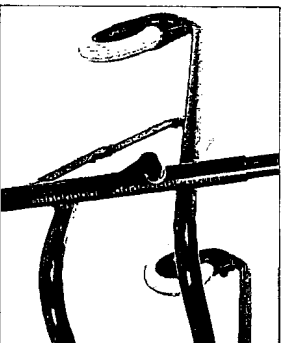


Figure 6

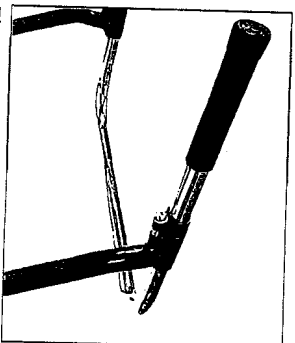


Figure 8

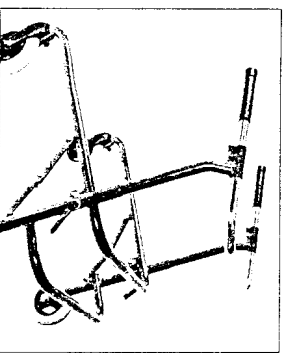


Figure 5

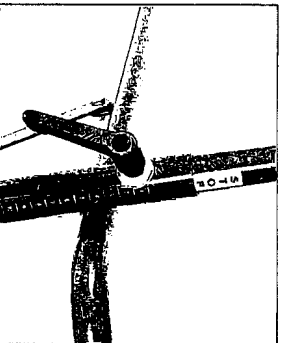


Figure 7



Figure 9

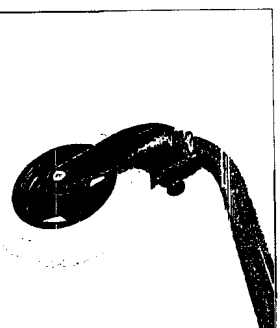


Figure 10

Hægt er að stilla hæð sætisins með því að losa sexkantsskrúfumar tvær á lóðréttu járnunum á sætinu (sjá 14. mynd). Þegar réttri hæð er náð eru sexkantsskrúfumar hertar á ný.

Þegar notandi hyggst ganga af stað gæti sætið verið fyrir. Þá er því einfaldlega ýtt aftur (sjá 15. mynd). Þegar notandinn vill seijast á ný er sætinu ýtt fram að nýju.

Karfa:

Kartan er fest með kórfuldara sem er festur annað hvort á miðja framhjólástöngina (efri staða kórflu) eða á afturhjólástöngina (neðri staða kórflu). Sexkantsskrúfumar tvær eru festar aftan frá gegnum kórfuldaran og í málmsyrktan plasthaldera (sjá 16. mynd).

Hægt er að festa kórfluna á krókana tvo á kórfuldaranum í tveimur hæðum, annað hvort í hástillingu með því að nota spöngina á miðri kórflunni (sjá 17. mynd) eða í lágstillingu með því að nota spöngina efst á kórflunni.

Veltivörn:

Veltivörn er sett á afturhjólarið með því að renna U-tenginu á veltivörninni yfir litla rörið aftan á afturhjólarið (sjá 18. mynd). Þrýstið sexkantsskrúfunni gegnum og skrúfuð hana fasta við U-tengið (sjá 19. mynd).

Hæðin á veltivörninni frá jörðu er stillt með stilliskrúfu ofan á veltivörninni (sjá 19. mynd). Fyrst er losað um festiróna. Til þess þarf 13 mm (1/2") lykil. Veltivörninni er lyft upp þannig að haus stilliskrúfunnar hvíli á afturhjólarið og svo er stilliskrúfan skrúfuð fram eða aftur til að ná réttri hæð. Að því loknu eru festirónin hert og sexkantsskrúfan skrúfuð föst gegnum U-tengið.

Toghemlar:

Toghemlarnir eru settir á afturhjólarið með því að ýta sexkantsskrúfu gegnum litla rörið framan á afturhjólarið og að skrúfa hana í róna sem er logsoðin við toghemilinn (sjá 20. mynd).

Þrýsingur á dekkið er stilltur með því að skrúfa neðri sexkantsskrúfuna í átt að neðsta hluta afturhjólariðsins (sjá 20. mynd). Þegar réttur þrýsingur er fenginn er festirónin hert.

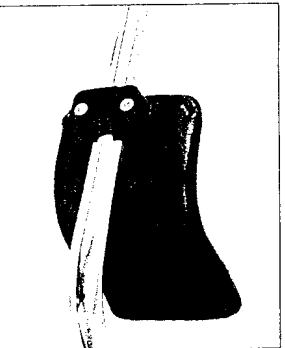


Figure 11

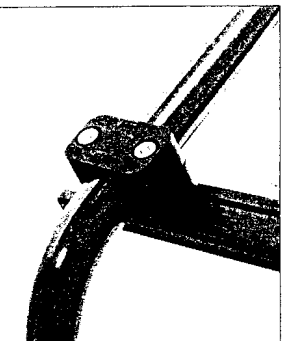


Figure 13

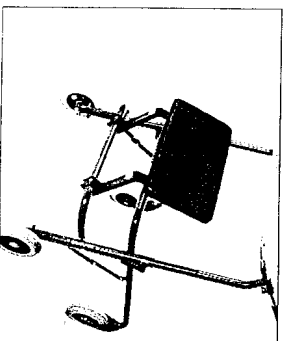


Figure 15

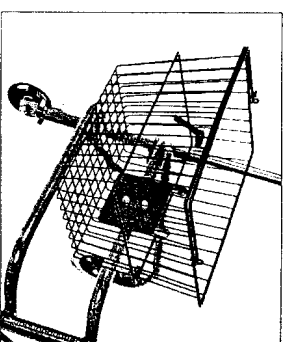


Figure 17

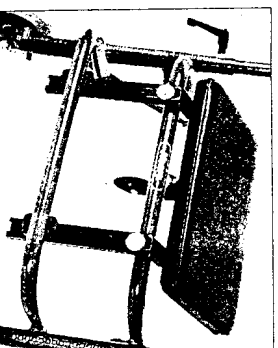


Figure 12

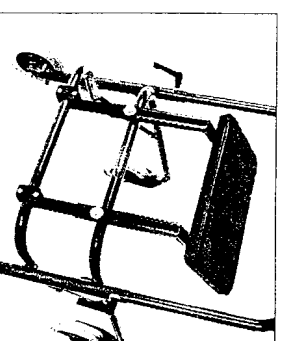


Figure 14

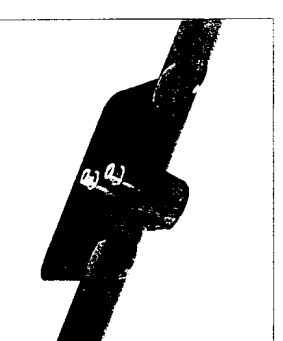


Figure 16

Handle bar	handföng
Upper tube	Efra rör
Front wheel bar	framhjólástöng
Allen key	Sexkantur
Rear wheel bar	afturhjólástöng
Rear wheel tube	Afturhjólarrör
Ruler	Stillir
Spanner grip	Hersluhandfang
Locking arm	Læsiarmur
Rear wheel	Afturhjól
Swivel lock	Snúningslás
Swivelling front wheel	Framhjól sem snýst

1. mynd

Kynning

Í þessum notkunarleiddæiningum er að finna upplýsingar um hvernig á að setja saman og stilla HENRY®, hvernig viðhaldi er háttað, hvers ber að gæta og annað sem máli skiptir.

HENRY® er viðsnúin göngugrind. Með því er átt við að notandinn yfir henni ekki á undan sér heldur dregur hana á eftir sér. Þannig fær hann bætt aðgengi að svæðinu fyrir framan sig og getur óhindrað hreyft sig áfram. Göngugrindin stuðlar á virkan hátt að styrkingu líkamans með göngu og stöðu og hvetur þannig til eðlilegrar göngu. HENRY® hentar bæði innan- og utanhúss.

Á 1. mynd má sjá nöfn einstakra hluta HENRY® sem vísað er til í textanum.

Áður en notkun hefst

Það er nær algjörlega búið að setja HENRY® saman við afhendingu. Kannist hvort í umbúðunum er að finna eftirfarandi:

- samanbrotna grunngrind,
- handföng með samanbrotnum efri rörum.

Athugið að 5 mm sexkantur fylgir með HENRY®. Hann er að finna í plastappa öðrum megin á afturhjólástönginni (sjá 1. mynd).

Að breyta út grunngrindina:

Grunngrindin er breitt út þannig að hún er látin standa á framhjólunum og haldið er í framhjólástöngina með annarri hendi (sjá 2. mynd). Síðan er tekið í afturhjólástöngina og henni lyft svo grindin opnast. Loks þarf að læsa grindinni með því að ýta læsiarminum lengra niður (sjá 3. mynd).

Að setja handföngin á:

Breitið út efri rör og seið hersluhandföngin utan á (sjá 4. mynd). Það gæti þurft að losa skrufurnar ofan á efri rörum (sjá 7. mynd) með sexkantinum. Hersluhandföngin eru alveg losuð af og efri rörunum komið fyrir ofan í götin efst á afturhjólarrörum

(sjá 5. mynd). Að lokum eru hersluhandföngin skrófuð aftur á efri rörin gegnum rauf í afturhjólarörum.

Að setja fylgihlutina á:

Lýsingu á því hvernig setja á fylgihluti á göngugrindina er að finna í kaflanum: „Að setja fylgihluti á og stilla þá rétt.“ Þetta á bæði við um þá fylgihluti sem fylgja og þá sem síðar eru keyptir.

Að stilla grunngerðina:

Hæð handfanga:

Hæð handfanga er stillt með því að losa hersluhandföngin og renna efri rörum upp eða niður á við (sjá 6. mynd). Notið merkistríkin á afturhjólarörum sem viðmið til að stilla í sömu hæð báðum megin. Herðið handföngin aftur þegar rétt hæð er fengin.

Viðvörðun:

Efri rörin á HENRY® III eru merkt með gulu viðvörðunarkerki (sjá 7. mynd). Merkið sýnir hámarksútdrátt á efri rörum, einungis efsti hluti gula viðvörðunarmiðans má sjást. Ekki má yfirstíga þessa viðvörðun, öryggisins vegna.

Lárétt stilling á handföngum:

Hægt er að renna handföngunum fram eða aftur í rörum með því að losa skrófurnar tvær (sjá 8. mynd) með sexkantinum. Þegar rétt staða hefur verið fundin eru skrófurnar hertar á ný með sexkantinum.

Snúningslás á framhjólum:

Snúningslásar eru staðalbúnaður á HENRY®. Hægt er að festa læsipinnann þannig að framhjólin geta snúist að vild (sjá 9. mynd) eða snúa honum í fjórðung úr hring þannig að hann festist í gati á framhjólina (sjá 10. mynd).

Að setja fylgihluti á og stilla þá rétt:

Mjadmastuðningur:

Mjadmastuðningurinn er festur á aftari hluta handfangarörsins. Fyrst er losað um skrófurnar sem halda plasthaldaranum aftan á hvorum mjadmastuðningi.

Plasthaldarinn er svo settur utan um rörið og skrófaður fastur með sexkantinum í festingarnar á mjadmastuðningnum (sjá 11. mynd).

Hægt er að stilla horn og fjarlægð mjadmastuðningsins með því að losa sexkantsskrófurnar. Herðið skrófurnar á ný eftir stillingu.

Að stilla sætishæð:

Sætinu er komið fyrir ofan á afturhjólastönginni. Fyrst er losað um skrófurnar sem halda plasthaldaranum og hann svo settur utan um rörið og skrófaður fastur með sexkantinum í lóðréttu járnin á sætinu (sjá 12. og 13. mynd). Ekki má herða skrófurnar mjög fast því þá er ekki hægt að ýta sætinu aftur þegar notandinn vill ganga af stað.

Hægt er að stilla hæð sætisins með því að losa sexkantsskrúfurnar tvær á lóðréttu járnnum á sætinu (sjá 14. mynd). Þegar réttri hæð er náð eru sexkantsskrúfurnar hertar á ný.

Þegar notandi hyggst ganga af stað gæti sætið verið fyrir. Þá er því einfaldlega ýtt aftur (sjá 15. mynd). Þegar notandinn vill setjast á ný er sætinu ýtt fram að nýju.

Karfa:

Karfan er fest með körfuhaldara sem er festur annað hvort á miðja framhjólstöngina (efri staða körfu) eða á afturhjólstöngina (neðri staða körfu). Sexkantsskrúfurnar tvær eru festar aftan frá gegnum körfuhaldarann og í málstyrktan plashaldara (sjá 16. mynd).

Hægt er að festa körfuna á krókana tvo á körfuhaldaranum í tveimur hæðum, annað hvort í hástillingu með því að nota spöngina á miðri körfunni (sjá 17. mynd) eða í lágstillingu með því að nota spöngina efst á körfunni.

Veltivörn:

Veltivörn er sett á afturhjólarið með því að renna U-tengingu á veltivörminni yfir litla rörið aftan á afturhjólarið (sjá 18. mynd). Þrýstið sexkantsskrúfunni gegnum og skrúfið hana fasta við U-tengið (sjá 19. mynd).

Hæðin á veltivörminni frá jörðu er stillt með stilliskrúfu ofan á veltivörminni (sjá 19. mynd). Fyrst er losað um festiróna. Til þess þarf 13 mm (1/2") lykíl. Veltivörminni er lyft upp þannig að haus stilliskrúfunnar hvíli á afturhjólarið og svo er stilliskrúfan skrúfuð fram eða aftur til að ná réttri hæð. Að því loknu eru festirónin hert og sexkantsskrúfan skrúfuð föst gegnum U-tengið.

Toghemlar:

Toghemlarnir eru settir á afturhjólarið með því að ýta sexkantsskrúfu gegnum litla rörið framan á afturhjólarið og að skrúfa hana í róna sem er logsóðin við toghemilinn (sjá 20. mynd).

Þrýstingur á dekkið er stilltur með því að skrúfa neðri sexkantsskrúfuna í átt að neðsta hluta afturhjólariðsins (sjá 20. mynd). Þegar réttur þrýstingur er fenginn er festirónin hert.

Öryggisráðstafanir

Viðvörðun:

HENRY® er meðferðarþjálfari og á einungis að notast í þeim tilgangi!
HENRY® rennur auðveldlega og alltaf ætti að hafa í huga mögulegar hættur sem börn geta lent í.
Athugið því:

Barn má aldrei vera án eftirlits í HENRY®!

Viðvörðun:

- Notið ekki verkfæri til að herða hersluhandföngin. Þá gætu handföng og/eða skrufangur skemmst.
- Athugið að kanna alltaf hvort allar skrufur og handföng hafa verið hert þegar stillingum er breytt.

Takmörk um notkun:

- Leyfður hámarksþungi notanda er:
50 kg fyrir stærðir I og II
80 kg fyrir stærð III.
- Göngugerindina ætti einvörðungu að nota á flötu, sléttu og öruggu undirlagi.

Viðhald

Hægt er að þvo HENRY® með klúti undnum upp úr heitu vatni og með venjulegri sápu.

Sé sápa oft notuð getur áferðin smám saman orðið mót en það er hægt að bóna grindina með bílabóni. Farið eftir fyrirmælum um notkun þess.

Að athuga herslu:

Kannið reglulega hvort öll handföng, boltar, skrufur og rær séu hertar nægilega mikið og herðið ef með þarf.

Tæknilegar upplýsingar:

Stærðir:	Stærð I	Stærð II	Stærð III
Heildarlengd	60 sm	69 sm	87 sm
Heildarbreidd	57 sm	61 sm	70 sm
Hæð handfanga	43-55 sm	55-75 sm	71-88 sm
Fjarlægð milli handfanga	40 sm	44 sm	49 sm
Sætishæð (aukahlutur)	40-52 sm	46-58 sm	57-74 sm

Þyngd:

HENRY® grunngerð	7 kg	8 kg	10 kg
Mjadmastuðningur	½ kg	½ kg	½ kg
Sæti m/hæðarstillingu	2 kg	2 kg	2 kg
Karfa	1 ½ kg	1 ½ kg	1 ½ kg
Veltivörn (par)	½ kg	½ kg	½ kg
Toghemlar (par)	½ kg	½ kg	½ kg

Efni:

Grind	Duftúðuð og krómhuðuð stálrör
Handföng	Svartur gúmmíþófi sem hrindir frá sér vatni
Aukahlutir	Duftúðað og svart rafgalvaníserað stál
Bólstrun aukahluta	Leðurliki

Annað:

Hjól	Mjúk gegnheil gúmmídekk á felgu úr gerviefni með sjálfsmyrjandi kúlulegum og samhæfðum bakhemlum.
Litir	Vínraut, RAL 3004 / Blátt, RAL 5002

CE-merking:

HENRY® e VE-merktur. Þetta er trygging fyrir því að HENRY® uppfyllir allar viðeigandi öryggiskröfur í tilskipun ESB 93/42/EEC um lækningabúnað.