
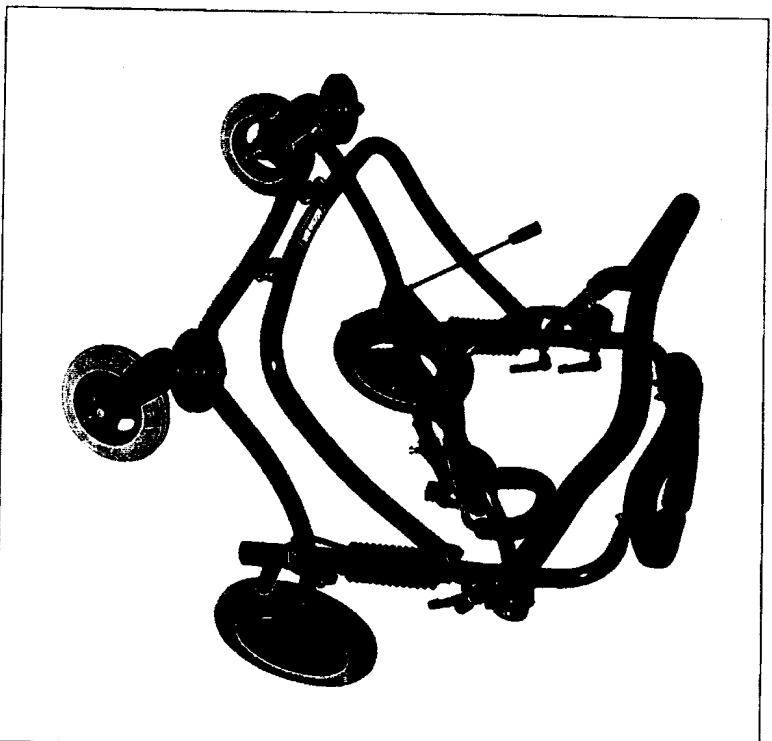


**H.Meyland-Smith A/S**

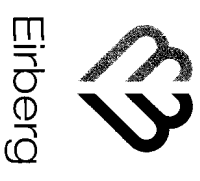

Notkunarleiðbeiningar fyrir

**Miniwalk®**


## Langangur

Í þessum notkunarleiddæiningum eru upplýsingar um hvernig setja á MINIWALK® göngugrindina saman og stilla hana. Hvernig halda á henni við, hvað ber að varast og önnur mikilvæg atriði.

MINIWALK® stærð 1 og 2 eru göngugrindur sem hæfa börnum frá u.p.b. 1 ½ árs aldri til u.p.b. 7 ára aldurs ( hæð frá 65 sm til 125 sm ) sem þurfa örugga göngugrind sem hægt er að stilla námkvæmlega fyrir hvern og einn.

Bolstuðningurinn og afturendastuðningurinn eru opnaðir með einföldu handtaki þannig að auðvelt er að komast í grindina og úr henni. MINIWALK® göngugrindin er með stórum hjólum og þess vegna hentar hún jafn vel utan húss sem innan

Mynd 1 sýnur nófnin á ýmsum hlutum göngugrindarinnar sem nefndir eru í textanum.

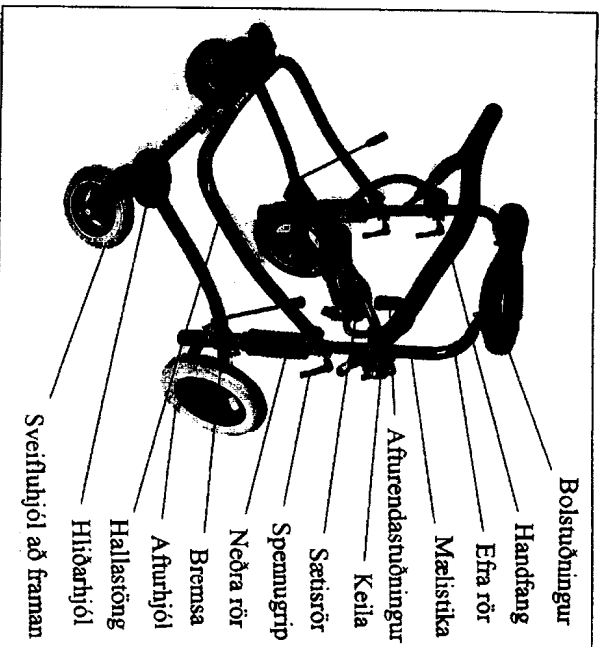

Mynd 1

**Áður en göngugrindin er notuð í fyrsta skipti.**


MINIWALK® göngugrindin er afhent samsett að mestu.

Gættu að hvort í þakkanum eru eftirfarandi hlutir:

- Neðri hluti grindar með hjólum og bremsum o.s.frv.
- Efti hluti grindar með sæti og bolstuðningi o.s.frv.

Gætið að því að 5 mm sexkant lyktil fylgi MINIWALK® grindinni.


Hann er undir sætinu (sjá mynd 2).

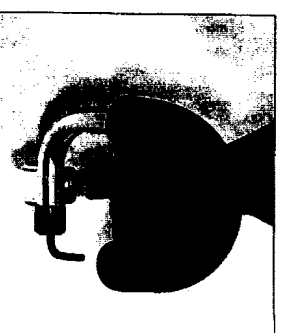

Mynd 2

### Að setja saman efri og neðri hluta


Fyrst þarf að ganga úr skugga um að gormur sé í báðum rörum neðri hlutans, þá er efri hlutanum komið fyrir í neðri rörinum tveimur (sjá mynd 3). Að síðustu er hallastöngin skrúfuð á hjartinnar ofan á gúmmihlífnum (sjá mynd 4).

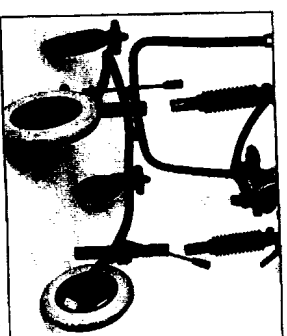

Mynd 3


### Að stilla venjulega MINIWALK® göngugrind

Hæð á bolstúðningi og sæti: Takið eftir því, að sætishæð breyrist um leið og hæð bolstúðnings er breytt. Sætishæðin og bolstúðningshæðin eru stilltar með því að miða við mælistikurnar á hlíðarörnunum. Hæð bolstúðningsins er stillt með því að losa neðri spennugripin (sjá mynd 5). Þá losna efri röin og hægt er að draga þau upp eða þrýsta þeim niður í neðri röin. Þegar búið er að finna réttu hæðina og aðgæta á mælistikunum að sama hæð sé báðum megin eru spennugripin hert aftur.

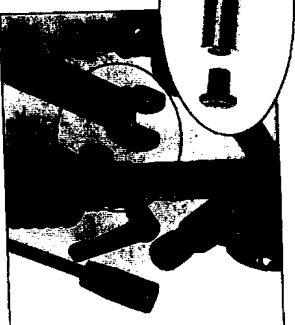

Mynd 4


Aðvörðun: Neðst á rörinum með mælistikunum er gult viðvörðunarkerki (sjá mynd 6. Merkið sýnir mestu leyflega hæð, þ.e. aðeins efsti hluti viðvörðunarkerksins má sjást. Það má ekki fara ofar, öryggisins vegna. Sætishæðin er stillt á sama máta með því að losa efri spennugripin (sjá mynd 5). Þannig er hægt að lyfta sætistöfinnu upp og niður eftir efri rörinum. Þegar réttu hæð er náð spennur þú gripin aftur föst og gættir að á mælistikunum að hæðin sé eins báðum megin.

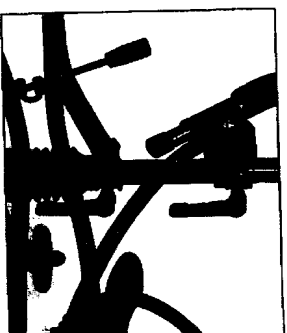

Mynd 5

Að skipta um fjaðrir:  
Það er hægt að skipta um fjaðrinnar tvær sem eru innan í neðri rörinum og fá þannig mykri eða stífarri fjöðrun. Sem viðmiðun ætti þungi notandans að geta sett fjöðrunina í botn. Það eru til þrenns komar mismunandi stífar fjaðrir, fyrir mismunandi lágmarksþyngd:

Grænar fjaðrir fyrir a.m.k. 10 kg þyngd.  
Sifurhlitlar fjaðrir fyrir a.m.k. 15 kg þyngd.  
Svartar fjaðrir fyrir a.m.k. 20 kg þyngd.

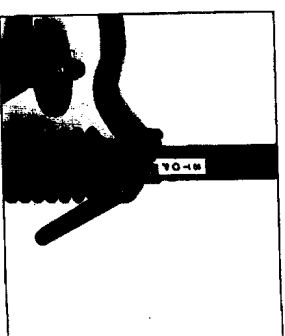

Mynd 6


Til þess að skipta um fjaðrir þarf þú að skrúfa hallastönguna af, báðum megin (mynd 7). Hallastöngin er fjarlægð og efri hluti göngugrindarinnar er tekinn af neðri hlutanum (sjá mynd 8). Neðri hlutina er þá settur á hvolf til að gormarnir detti úr (sjá mynd 9). Nýju gromunum er komið fyrir í miðju innaröri í botni neðri hluta grindarinnar. Að lokum er efri hluti göngugrindarinnar settur á sinn stað og hallastöngin skrúfuð á aftur.



Mynd 7

### Sættistelling og sætishalli.

Það má færa sætið frammar eða aftar með því að losa innansexkantiskrúfunna undir sætinu (sjá mynd 10) og skrúfa hana síðan fasia þegar réttu stellingu er náð. Það má einnig stilla halla sætisins með því að losa rærnar tvær undir festingu sætisins (sjá mynd 10). Þú þarf 10 mm lykili til þess. Síðan skrúfðu rærnar fastar aftur þegar réttum halla er náð.

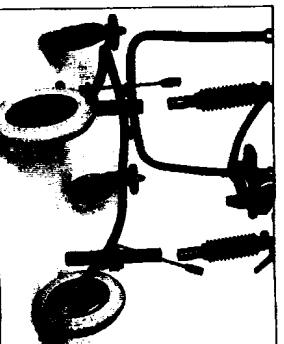

Mynd 8




Mynd 9



Mynd 10

### Afturhlutastuðningur

Afturhlutastuðningma fyrir aftan sætið má færa fram og aftur. Afturhlutastuðningurinn er togaður upp og frá og þá kemur í ljós sexkant-skrúfa innan í U laga járn. Með því að losa sexkantskrúfuna er hægt að færa stuðninginn fram eða aftur ( sjá mynd 11). Síðan er sexkant-skrúfan fest aftur.

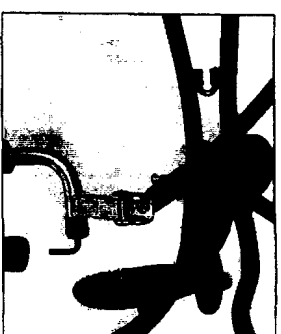

Mynd 11

### Handfang.

Handfangið er fest beggia vegna í rörlutun sem staðsettur eru á keilum. Keilunum er haldið föstum með sexkantskrúfum og þegar þær eru losaðar er hægt að snúa handfanginu um keilurnar (sjá mynd 12). Það er einnig hægt að renna handfanginu fram eða aftur í rörlutunum með því að losa sexkantskrúfurnar tvær á hliðum handfangsins. (sjá mynd 12). Þegar réttri stellingu er náð eru sexkantskrúfurnar festar aftur.



Mynd 12

### Bremstur.

Notkun bremsanna.

Bremsturnar eru stöðubremstur og festa afturhjólin með bremsuklossa sem þrýstist að dekknu. Til að bremsa göngugrindina dregur þú bremsurnar alla leið aftur (sjá mynd 13). Í þessari stellingu læsast bremsurnar af sjálfu sér. Þú tekur úr bremsu með því að yta bremsunum fram á við. Athugið: Ekki er hægt að stilla bremsurnar.



Mynd 13

### Varrúðarráðstafanir.

#### Viðvörðun:

Vegna fjöðurnar Miniwalk® göngugrindarinnar er hætt á að miðg eirðarlaus einstaklingur geti velt henni. **Skildu aldrei notanda Miniwalk® göngugrindar eftir einan.**

#### Viðvörðun:

Ef þú fjarlægir hluta grindarinnar koma opnir rörendar í ljós. Þar kunna að vera beittir hlutir sem geta serti fingur. Miniwalk® er hönnuð með það í huga að komast hjá opnum rörendum! Ef svo vill til að rörendi standi opinn, er mælt með að loka honum með plastappa.

#### Takmörk:

Hámarks þungi notanda er 40 kg.

Göngugrindina á aðeins að nota á sléttu, láréttu og jöfnu undirlagi.

### Viðhald:

Göngugrindina má þvo með volgu vatni og venjulegum hreinsilegi. Varastu að bleyra bólsrunina á grindinni.

Við endurtekna notkun á hreinsilegi má búast við að yfirborð grindarinnar verði matt. Þá má bóna hana með blabóni. Fylgið reglunum á böninu.

### Að herða grindina upp.

Gerðu reglulega að því að allar skrufur, boltar og grip séu vel hert.

### Að smyrja fjöðir:

Ef þú heyrir braka í fjöðrum Miniwalk® grindarinnar er hægt að smyrja þær frá neðri enda röðanna. Þú hvolfir grindinni og smá olíudropa er dreypt í götin næst miðjunni. Láttu göngugrindina vera kyrra á hvolfi í nokkrar mínútur til að olían nái að dreifa sér. Þá er göngugrindin sett á réttan kjöl aftur og dagblað sett undir til að olía leki ekki á gölf.



## Tæknilegar staðreyndir:

Stærðir:	Stærð 1	Stærð 2
Lengd	74 sm	74 sm
Breidd að utan	65 sm	65 sm
Breidd að innan	39 sm	39 sm
Sætishæð	28-48sm	28-63 sm
Bolstuðningshæð	55-75 sm	70-90 sm
Bolstuðningsmöguleikar (brjóstmál)	70 sm,90 sm	70 sm,90 sm

### Þyngd:

Miniwalk® grunn tegund

15 kg

15 kg

### Efni:

Rammur:

Húðuð stálrör

Festingar:

Rafnúðað stál

Sætisáklæði:

Gervileður

### Annað:

Hjúóli:

Mjúk gúmmihjúóli með sjálfsmyrjandi legum, án slöngu, á felgu úr gervielefni

Litur:

Grænblátt, RAL 5021/Rautt, RAL 3002.

### CE merkingar:

Miniwalk® göngugrindin er CE merkt. Það veitir að Miniwalk® göngugrindin uppfyllir þær kröfur sem gerðar eru til lækningatækja samkvæmt tilskipun Eyrópusambandsins 93/42/EEC.

# CE

Seljandi:

Eirberg ehf  
Stórhöfða 25  
110 Reykjavík

Sími 569 3100  
Fax 569 3101  
Netfang [eirberg@eirberg.is](mailto:eirberg@eirberg.is)  
Veffang [www.eirberg.is](http://www.eirberg.is)