




EZ stuðningshandfang á rúm

Notandaleiðbeiningar

Trönuhrauni 8
220 Hafnarfjörður
Sími 565 2885 / Fax 565 1423
stod@stod.is / www.stod.is


Stuðningshandfang á rúm EZ– NC94234

Handfangið er til stuðnings og til að auðvelda fólki að fara úr og í rúmið. Handfangið er ekki hugsað til að bera fulla þyngd notandans.

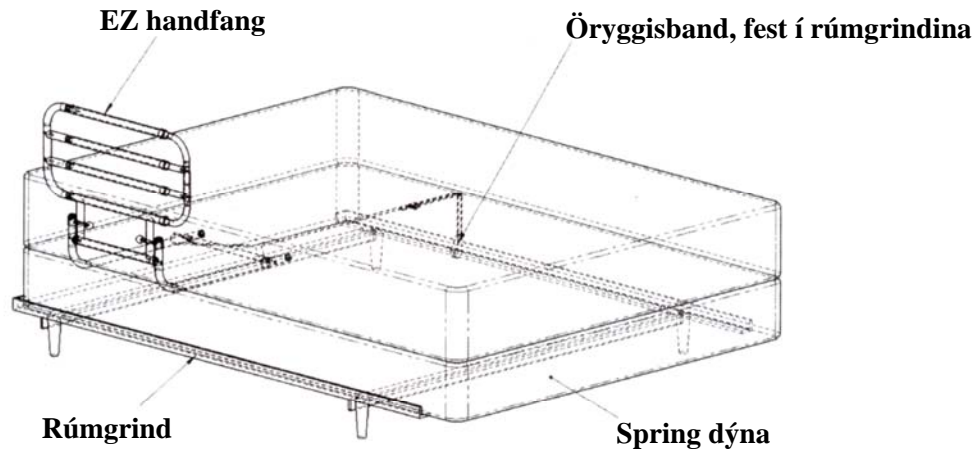

Handfangið festist á L laga grindina sem fer á milli dýnanna. Setjið öryggisbandið á L grindina og festið þverslánna.

Á efsta rörinu eru þrjú göt þannig að hægt er að breyta lengdinni á handfanginu með því að þrýsta á hnappinn og toga í handfangið þar til hnappurinn fer í annað gat.

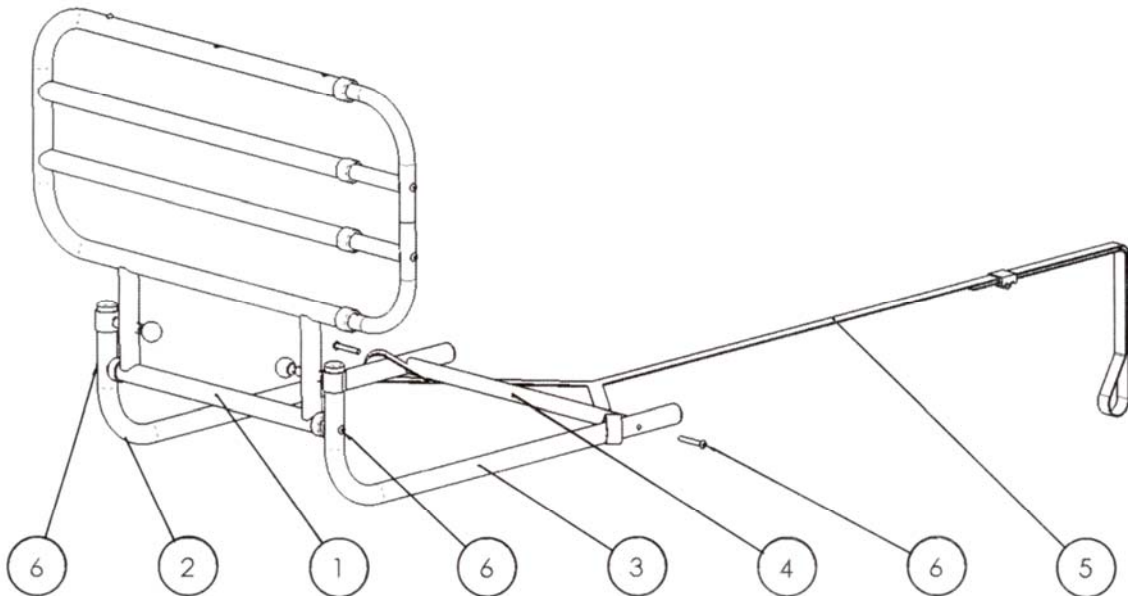

Varist klemmuhættu fyrir höfuð, hendur og fætur.

Passið að ekki sé bil á milli handfangsins og dýnunnar.

Rúmdýnan þarf að vera nægjanlega þykk og þung til að skorða handfangið.