


Útigönguþing með setstuðningi

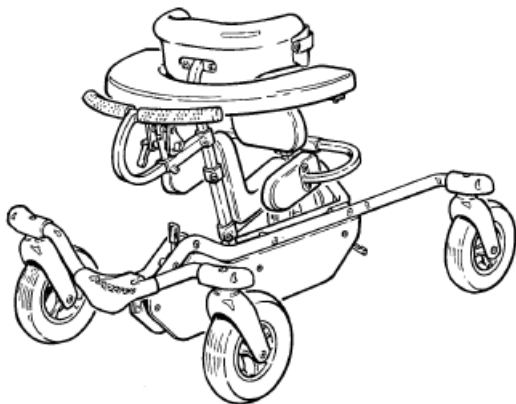

Hreinsun og viðhald

Hreinsið ramman reglulega með volgu vatni.og sérstaklega þegar hann hefur verið úti í rigningu.

Notið ekki bleykiefni—sþritt.

Gott viðhald = góð ending !

R82 

R82 í Danmörku er leiðandi í framleiðslu hjálpartækja. Þeir sérhæfa sig í barnahjálpartækjum og bjóða eingöngu tæki í háum gæðaflokki.



R82 

bronco




Víkurbær 8 • S: 5600 900 • www.akarlsson.is

R82 


Notkunarleiðbeiningar

Hæðarstilling á sæti:

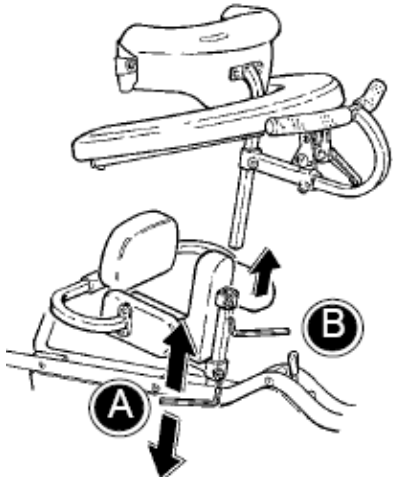


Stillið hæð sætisins með því að losa um skráfu B með sexkanti.

Bremsur:

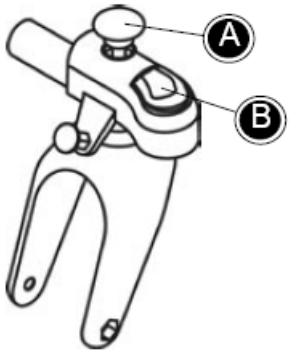

Bremsur eru á öllum fjórum hjólunum. Sett er í bremsu með því að ýta á (A) með fæti. Til að losa um bremsu ýtið með fæti á (B).

Stefnulæsing:

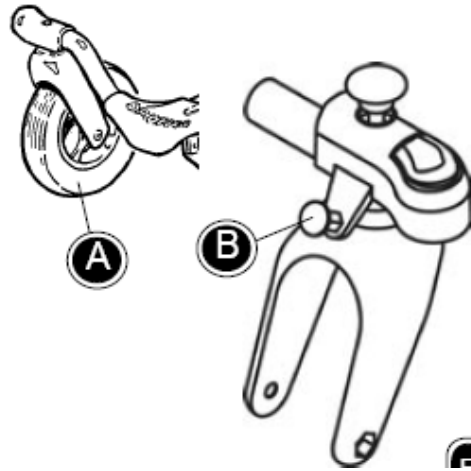


Stefnulæsing kemur í veg fyrir að dekk snúist. Til að setja hjól í stefnulæsingu setjið dekk í fram stöðu sjá (A).

Snúið takka (B) og stefnulæsing er sett á.

Til að taka stefnulæsingu af tosið í takka (B) og snúið.

Handfang:

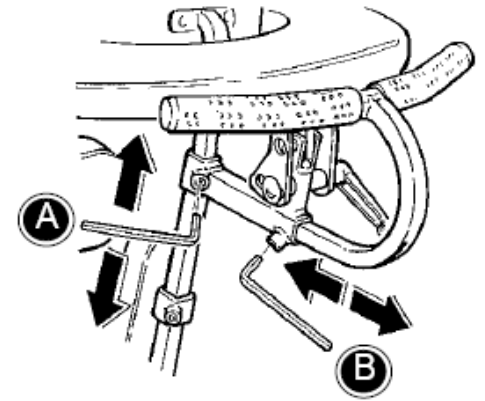

Til að hæðarstilla handföng notið 6 mm sexkant (A).

Til að dýptarstilla handföng notið 6 mm sexkant (B).