



## Að leggja grindina saman:

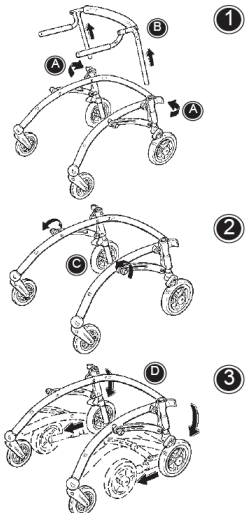

- 1) Opnið læsinguna fyrir efri rammann (A) og takið hann af (B)
- 2) Losið um rærnar á hlið grindarinnar (C)
- 3) Takið um rammann rétt ofan við framhjólin og ýtið honum fram og hann leggst saman (D)

## Flutningur og geymsla:

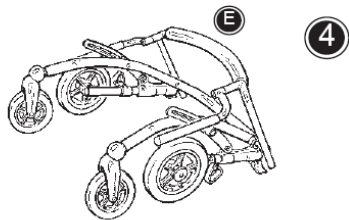

- 4) Þegar búið er að leggja Crocodile saman, setjið efrihluta rammans ofan á rammann eins og sýnt er á mynd E

## Hreinsun og viðhald:

Til að tryggja góða endingu og gott útlit á stólnum er reglulegt viðhald og þrif nauðsynlegt. Bæði á ramma og sæti.

Óhreinindi úr sæti má þrifa með því að strjúka yfir með svampi sem bleyttur hefur verið í volgu vatni og mildu hreinsiefni. Hreinsa svo með vatni og láta þorna.

Notið ekki bleykiefni - spritt.

Ef óhreinindir eru föst- strjúkið með mjúkum bursta

Rammann þarf að þrifa reglulega með "non-abrasive" hreinsiefni og bóna síðan með "non-abrasive" bílavaxi

**Gott viðhald = góð ending !**

R82<sup>®</sup>

R82 í Danmörku er leiðandi í framleiðslu hjálpertækja. Þeir sérhæfa sig í barnahjálpertækjum og bjóða eingöngu vörur í háum gæðaflokki.



Víkurhvarfi 8 • S: 5600 900 • [www.akarlsson.is](http://www.akarlsson.is)




crocodile™



R82<sup>®</sup>


# Notkunarleiðbeiningar

## Stillingar:

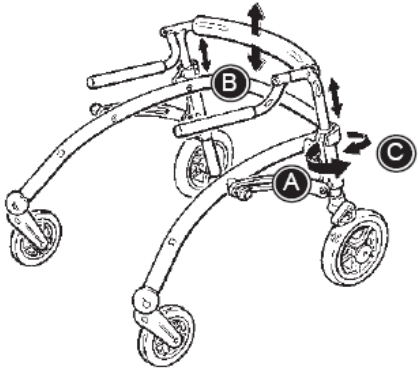

### Efri hluti ramma.


- 1) Losið um læsinguna fyrir efri rammann (A)
- 2) Lyftið upp eða lækkið rammann (B)
- 3) Herðið læsinguna aftur (C)

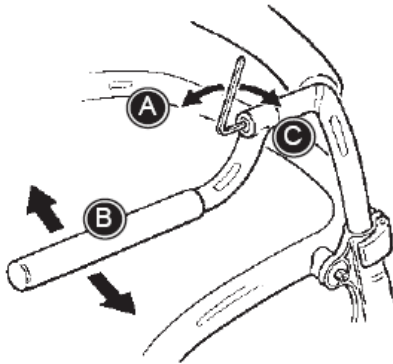

### Að stilla handföngin

- 1) Losið um skrúfuna (A) með sexkanti.
- 2) Snúið handfanginu í rétta stöðu (B).
- 3) Herðið skrúfuna aftur með sexkanti (C).

## Tregðubremsa:

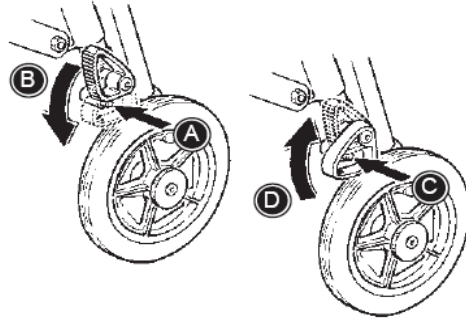

### Setja bremsu á.

Ýtið á öryggispinnann (A) og fellið niður tregðubremsunu (B). Bremsan er nú virk.


**Taka bremsu af.** Ýtið á öryggishnappinn (A) og lyftið upp tregðubremsunni (B) Þegar öryggispinninn smellur út er tregðubremsan ekki lengur virk.

## Veltivörn:


### Setja vörn á.

Snúið veltivörninni niður. Vörnin verður virk þegar öryggispinninn (A) smellur.

**Taka vörn af.** Ýtið á öryggispinnann (A) og snúið vörninni upp. Hún er orðin óvirk þegar öryggispinninn smellur inn.

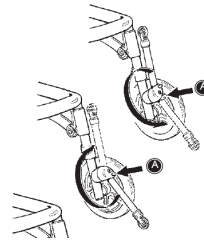

## Framhjól með stefnulæsingu:

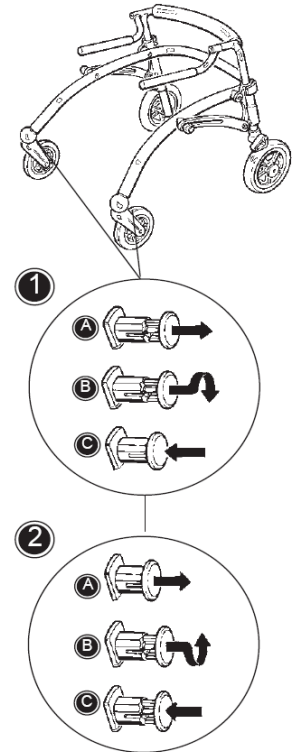

Þegar stóllinn er afhentur er stefnulæsingin óvirk sem þýðir að framhjólin geta snúist í allar áttir.

Til að virkja stefnulæsinguna dragið hnappinn (A) og snúið til hægri (B). Sleppið hnappinum aftur (C) og stefnulæsingin er orðin virk. Sem þýðir að framhjólin eru læst í eina átt.

Til að aftengja stefnulæsinguna aftur, dragið hnappinn (A) og snúið til vinstri (B). Sleppið hnappinum aftur og stefnulæsingin hefur verið aftengd.