

Notkunarleiðbeiningar

Athugið:

- Ekki vera með oddhvassa hluti nálægt sessunni
- Ekki vera sessuna nálægt heitu svæði, ösku eða eldi
- Ekki nota ventilinn sem handfang
- Ekki nota krem sem innihalda olíu eða lanolín á sessuna
- Ekki nota sessuna á / í vatni
- Ekki setja sessuna í sóttþreinsiofn (autoclava) – lokaður ventill getur valdið þrýstingi og sessan rifnað
-

Leiðbeiningar um stillingar á ROHO HP/LP sessum

Stig 1. Opnaðu ventilinn (snúðu rangsælis)

Stig 2. Festu slönguna á pumpunni á enda ventsilsins. Pumpaðu lofti í ventilinn þangað til loftmagnið er orðið það mikið að sessan myndi boga.

Stig 3. Fjarlægðu pumpuna og lokaðu ventlinum snögglega með því að snúa honum réttisælis.

Stig 4. Sestu á sessuna miðja með arma og fætur í góðri stöðu.

Stig 5. Renndu hendinni undir afturendann til að finna neðsta flöt líkamans, sem er setbeinið (ischial tuberosity). Ef þú ert ekki örugg/ur þá skaltu lyfta læri notandans og færa höndina innar og þá ættir þú að finna fyrir setbeininu

Stig 6. Hafðu aðra höndina undir setbeininu og notaðu hina höndina til að opna ventilinn. Loft mun leka úr sessunni og notandinn byrjar að “sökva” ofaní sessuna. Það á að vera um það bil $\frac{1}{2}$ “ eða 1.25 sm af lofti milli setbeins og neðsta hluta sessunnar. Þegar fingurtopparnir eru milli setbeins og undirstöðu sessunnar skaltu skrúfa fyrir ventilinn. Þú verður að geta hreyft fingurtoppa.

Stig 7. Athugaðu hvort loftmagnið í sessunni sé rétt. Það þarf að gera með reglulegu millibili

Hægt er að fara á heimasíðu Roho og sjá myndrænt hvernig á að stilla sessurnar. Sjá slóð:

<http://www.rohoinc.com/medical/properadjust/instruction.html>

Seljandi:
Eirberg ehf.
Stórhöfða 25
110 Reykjavík

sími 569 3100
www.eirberg.is