


## Hæðarstilling á lyftiarmi:

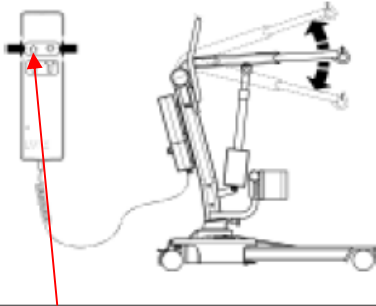

Til að stilla lyftiarm – ýtið á örvarnar upp eða niður til að færa lyftiarmann í rétta stöðu.




Bls. 5

## Hreinsun og viðhald

Til að tryggja góða endingu og gott útlit á standlftunni er reglulegt viðhald og þrif nauðsynlegt. Þrifið með rökum klút og mildri sápu. Notið ekki bleykiefni — spritt.

Þegar lyftarinn er ekki í notkun pressið rauða takkanum sem er staðsettur framan á batterí “inn”. Snúið honum út þegar nota á lyftarann. Þegar komin er tími á að hlaða heyrst “píp” hljóð en góð regla er að hlaða batterí hvert kvöld ef standlyftarinn er notaður daglega.

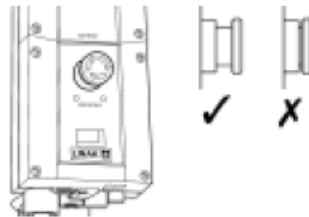

Gott viðhald = góð ending !

Joyerns Healthcare í Englandi er í farabroddi fyrirtækja í framleiðslu lyftara. Þeir leggja mikið upp úr hönnun og vörubrúun og bjóða eingöngu tæki í háum gæðaflokki.



Bls. 6

Víkurhvarfi 8 • S: 5600 900 • [www.akarlsson.is](http://www.akarlsson.is)



## Ascend standlyftari



Bls. 1

# Notkunarleiðbeiningar

## Ascend standlyftari



Hámarksþyngd notanda 170 kg  
Rafdrifið hjólastell  
Lyftuhæð frá 99 cm til 166,5 cm  
Snúningsradius 132 cm  
Þvermál hjóla 100 mm  
Þyngsti hluti 23,5 kg  
Sterklega byggður – Úr áli og auðveldari í meðferð en sambærilegir lyftarar úr stáli.  
Fylgihlutir gera hann að mjög hagkvæmum kosti  
Fjölbreytilegur, Sveigjanlegur, Gagnlegur

Bls. 2



**Rafdrifnir fætur** – Hægt að færa fætur sundur og saman með fjarstýringu, þ.a.l. minna álag á umsjáraðila á meðan flutningi stendur



**Færanlegur fótabakki.** Gefur einstaklingnum möguleika á að þjálfa göngu á meðan flutningi stendur. Einnig til að auðvelda þríf á fótbakka.



**Geymsluhólf fyrir fjarstýringu**  
Tryggir að fjarstýringin sé alltaf á sínum stað.  
Hægt er að færa hana til



**3. Einstefnu búnaður á hjólum**  
Betri stjórn á lyftunni þegar verið er að ýta í beinni línu


Bls. 3



### Mótað handfang

Einstaklingurinn getur haldið í sitt hvort handfangið sem veitir öryggisfinningu og stöðugleika á meðan flutningi stendur

### Stillanlegir hnépúðar

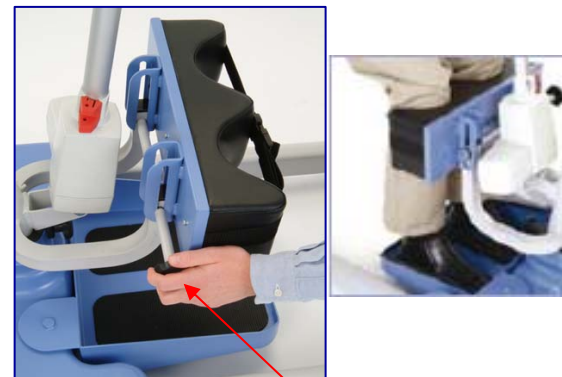

Til að stilla hnépúða losið um skrufuna og settið hnépúða á réttan stað fyrir viðkomandi. Eykur þægindi og öryggi.

Bls. 4