


Bremsur

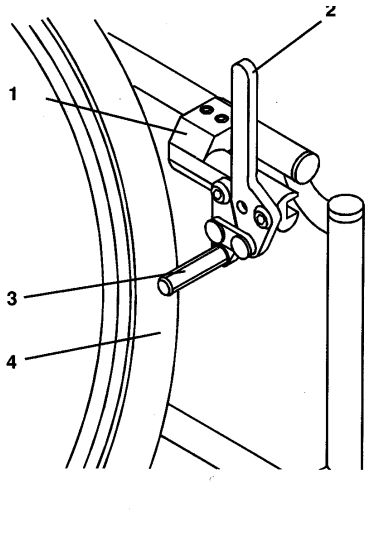

Bremsur á Rubix stólum eru svokallaðar “Wheel lock bremsur.

Stóllinn er settur í bremsu með því að ýta skafti (1) fram, en losað úr bremsu með því að ýta skafti (1) aftur.

Hreinsun og viðhald

Til að tryggja góða endingu og gott útlit á stólum er reglulegt viðhald og þrif nauðsynlegt. Bæði á ramma og sæti.

Óhreinindi úr sæti má þrifa með því að strjúka yfir með svampi sem bleyttur hefur verið í volgu vatni og mildu hreinsiefni. Hreinsa svo með vatni og láta þorna.

Notið ekki bleykiefni — spritt.

Ef óhreinindir eru föst— strjúkið með mjúkum bursta

Rammann þarf að þrifa reglulega með “non-abrasive” hreinsiefni og bóna síðan með “non-abrasive” bílavaxi

Gott viðhald = góð ending !




Sunrise Medical í Englandi er í farabroddi fyrirtækja í framleiðslu hjálpertækja. Þeir leggja mikið upp úr hönnun og vöruþróun og bjóða eingöngu tæki í háum gæðaflokki.

Breezy Rubix



Notkunarleiðbeiningar

Krossrammastóll

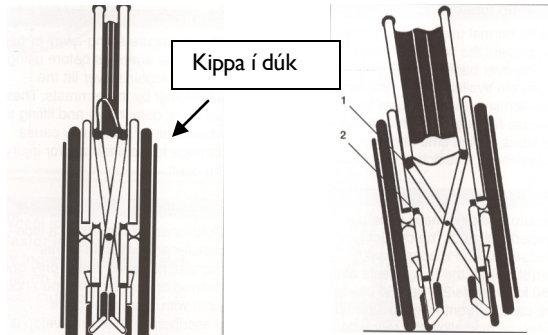

Fella saman :

Kippið dúknum upp - við það fellur stóllinn saman

Fella sundur:

Hallið stólnum á annað afturdekkið (2) og ýtið á rammann (1) við það fer stóllinn í sundur. Smellið þá rammanum ákveðið niður svo stóllinn skorðist í festingunum.


Fótahvílur



Losa : Ýtið flibba (1) að stellingu (2) og snúið fótahvílunni útávið. Til að losa fótahvíluna alveg af stólnum skal lyfta henni upp og fjarlægja. **Hæðarstilla:** Losið skrufu (1) með 4mm lykli sem er staðsettur aftan/neðarlega á fótplötuleggnum, stillið hæð plötunnar og festið skrufuna aftur.

Sett á: Þegar þetta er gert vísar fótahvílan út- eða innávið. Til að fótahvílan snúi eðlilega er henni snúið beint fram og læst niður í eðlilega stöðu.


Veltivörn

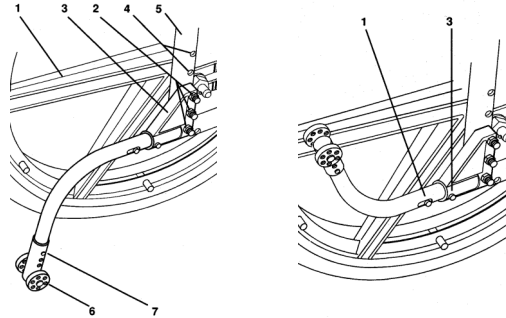

Breyta hæð : Færið til skrufu (7). Einnig má færa plastfestingu (3) upp í göt (4)

Snúa upp: með því að ýta á pinna (3) og snúa röri (1).
Taka af/á: ýtt á pinna (1) til að losa hnapp (3)

Hraðlosun dekkja

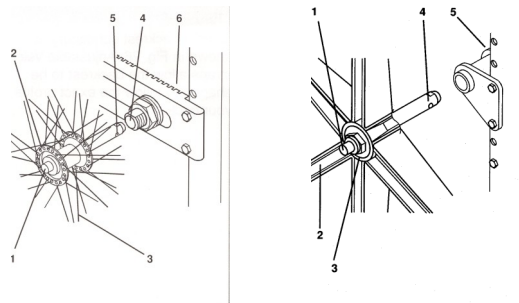

Quicky: Ýtið á hnapp (1) og haldið inni—afturdekk dregið frá og tekið af stólnum.

Breezy: Ýtið á hnapp (1) og öxull (4) dreginn út úr öxulhúsi (5).

Hæðarstillanlegir armar



Armar fjarlægðir á stól: Ýtt er á handfang (2) og armhvíla tekin upp (Fig 32a). Þegar armur er settur aftur er mikilvægt að þeir læsist niður í festinguna.
Hæð stillt á armi: Ýtt er á hnapp (1) og ýtið armi í æskilega hæð.

Stillanlegir riflásar á bakhvílu



Losað er um riflása eða þeir strekktir til að stilla af bakhvílu.