

Hægt að fella niður til að auðvelda flutning eða til að koma fyrir.



1. Leggið lyftiarm í neðstu mögulega stöðu og færið hnéstuðninginn í efstu stöðu.



2. Losið um mastrið með því að losa um skrúfuna.

Lyftið mastrið upp og leggið niður.




3. Ýtið létt niður á mastrið og það heyrir "kling" og Journey er tilbúin til flutnings.

Bls. 5

Hreinsun og viðhald

Til að tryggja góða endingu og gott útlit á standlyftunni er reglulegt viðhald og þrif nauðsynlegt. Þrifið með rökum klút og mildri sápu. Notið ekki bleykiefni — spritt.

Þegar lyftarinn er ekki í notkun pressið rauða takkanum sem er staðsettur framan á batteríi "inn". Snúið honum út þegar nota á lyftarann. Þegar komin er tími á að hlaða heyrir "píp" hljóð en góð regal er að hlaða batterí hvert kvöld ef standlyftarinn er notaður daglega.

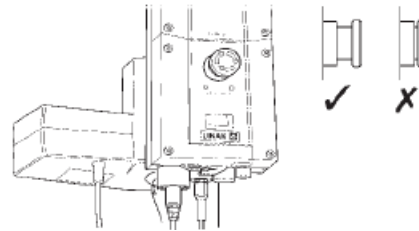

Gott viðhald = góð ending !

Joyerns Healthcare í Englandi er í farabrodri fyrirtækja í framleiðslu lyftara. Þeir leggja mikið upp úr hönnun og vörubrúun og bjóða eingöngu tæki í háum gæðaflokki.

Bls. 6



Journey standlyftari



Bls. 1



Notkunarleiðbeiningar

Journey



Hámarksþyngd notanda 155 kg
Fótastíllt hjólastell
Lyftuhæð frá 72 cm til 153 cm
Snúningsradius 114,5 cm
Þvermál hjóla 100 mm að aftan og 75 að framan
Þyngsti hluti 20 kg
Hægt að leggja saman
Hægt að stilla hluta handfangs
Sterklega byggður – Úr áli og auðveldari í meðferð en sambærilegir lyftarar úr stáli.
Fylgihlutir gera hann að mjög hagkvæmum kosti
Fjölbreytilegur, Sveigjanlegur, Gagnlegur

Bls. 2



Góð stuðningshandföng. Veitir einstaklingnum örugga og góða stöðu á meðan flutningi standur




Færanlegur fótabakki. Gefur einstaklingnum möguleika á að þjálfa göngu á meðan flutningi standur. Einnig til að auðvelda þríf á fótbakka



Geymsluhólf fyrir fjarstýringu

Tryggir að fjarstýringin sé alltaf á sínum stað.

Hægt er að færa hana til

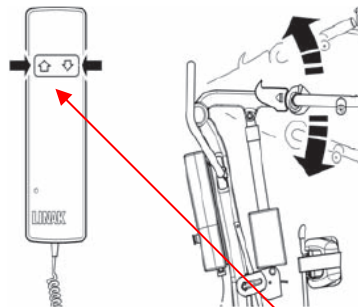

Til að stilla lyftiarm – ýtið á örvarnar upp eða niður til að færa lyftiarm í rétta stöðu.

Bls. 3

Stilling á handföngum



Hægt er að velja um 3 stillingar, allt eftir hvað passar best fyrir þann einstakling sem á að lyfta. Þrýst er á handfang sem staðsett er fremst á handfangi.

Stillanlegir hnépúðar



Ýta sveifinni niður og tekið er í handfang sem staðsett er fyrir ofan hnépúðann og hann stilltur í rétta hæð fyrir viðkomandi.



Öryggisbelti til að auka öryggi og veita meiri stuðning.

Bls. 4