

Bremsur



“Standard” (Venjulegar) Bremsur á Quickie stólum eru svokallaðar “High-Low bremsur.

Stóllinn er settur í bremsu með því að ýta skafti (I) fram, en losað úr bremsu með því að ýta skafti (I) aftur.

Hreinsun og viðhald

Til að tryggja góða endingu og gott útlit á stólum er reglulegt viðhald og þrif nauðsynleg. Bæði á ramma og sæti.

Óhreinindi úr sæti má þrifa með því að strjúka yfir með svampi sem bleyttur hefur verið í volgu vatni og mildu hreinsiefni. Hreinsa svo með vatni og láta þorna.

Notið ekki bleykiefni eða

Ef óhreinindir eru föst- stjúkið með mjúkum bursta

Rammann þarf að þrifa reglulega með “non-abrasive” hreinsiefni og bóna síðan með “non-abrasive” bílavaxi

Gott viðhald = góð ending !




Sunrise Medical í Englandi er í farabroddi fyrirtækja í framleiðslu hjálpartækja. Þeir leggja mikið upp úr hönnun og vöruþróun og bjóða eingöngu tæki í háum gæðaflokki.

Breezy Relax hægindarstóll



Notkunarleiðbeiningar

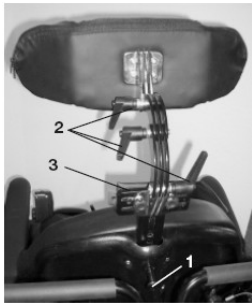

Hæðarstilling höfuðhvílu

Togið í hnapp (1) og setjið höfuðhvílu í rétta hæð.

Lárétt stilling

Snúið handfangi (2) og stillið í ákjósanlega stöðu og festið aftur.

Hliðarstilling

Losið skráfur (3) og hægt er að færa höfuðstuðning til beggja hliða. Herðið skráfur aftur.

Fótahvílur




Til að lyfta fótahvílu upp:

Færið fótlegg af fótahvílu og losið um handskráfu (1). Lyftið í ákjósanlega hæð og herðið.

Til að fjarlægja:

Ýtið á handfang (2) og ýtið fótahvílu út til hliðar og lyftið upp.

Veltivörn

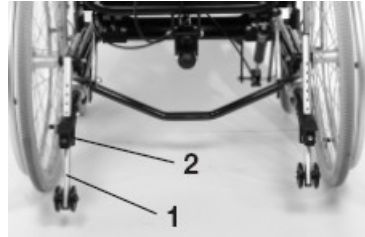


Breyta hæð : Togið í hnapp (2) og þá er hægt að hæðarstilla þær niður eða upp. Það eiga að vera alla vega 2.5 cm að gólfi. Þegar farið er niður eða upp stiga þarf að hafa þær í hæðstu stöðu.

Hæðarstilling á aksturshandföngum



Losið um handskráfu (1) og hæðarstillið handföng (2) í rétta hæð.

Hæðarstillanlegir armar

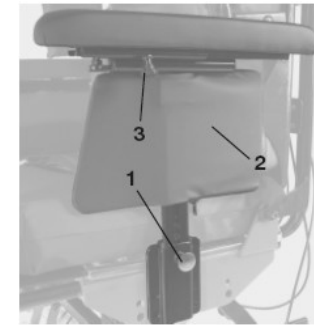

Hæðarstilling: Ýtið á hnapp (1) og stillið hæðina.

Dýptarstilling armpúða: Losið um fingraskráfu (3) og færið fram/tilbaka og herðið aftur.

Tilt og bakhalli



Tilt: Takið í handfang sem er merkt tilti og setjið í ákjósanlega stöðu og sleppið handfangi.

Bakhalli: Takið í handfang sem er merkt bakhalla og setjið í ákjósanlega stöðu og sleppið handfangi.