


## Höfuðstuðningur og keyrsluhandfang

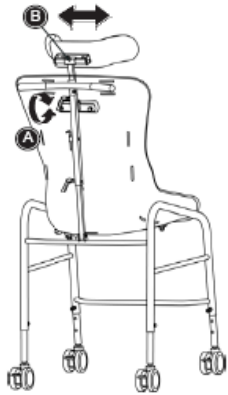

### Höfuðstuðningur:

1. Losa þarf festingu (A) til að geta fest höfuðstuðninginn. Höfuðstuðningurinn er settur niður í hvítu stöngina og er fest í æskilega hæð.
2. Hægt er að stilla höfuðstuðninginn enn frekar með því að losa um sknúfu (B) og sknúfan er aftur fest þegar búið er að stilla hann frekar.

### Aksturshandfang

1. Losa þarf festingu (A) og aksturshandfangið er sett niður í hvítu stöngina og er fest í þeirri hæð sem passar.

**Ef festa á bæði höfuðstuðning og aksturshandfang** - þá er aksturshandfangið fest á stöngina sem er á höfuðstuðningnum. Eftir það er höfuðstuðningurinn festur eins og lýst er hér fyrir ofan. Stöngin sem kemur með aksturshandfanginu er því óþörf.

Bls. 5

## Hreinsun og viðhald

Til að viðhald sé gott er góð regla að þerra stólinn eftir notkun.

Ef stólinn er með bólstrun þá er hún tekin úr stólnum og þrifu í höndum með upp til 50° heitu vatni.

**Ekki má nota klór til að þrifa**

**Nota skal almenn hreingerningarefni eins og t.d sulfo, Ajax o.s.fv.**

Bls. 6

## Swan Salernis- og sturtustólar



Bls. 1

# Notkunarleiðbeiningar


## Swan - tekin í notkun:



Fjarlægð tré bitann sem er staðsettur fyrir aftan stólinn - er til að verja stólinn undir flutning.


Swan er núna tilbúinn til notkunar.

## Vinkilstilling á sætiseiningu.

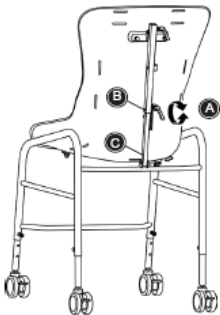

1. Losa um handfang (A)
2. Ýtt er á takka (B) inn og þá er hægt að tilla sætiseiningu.
3. Herða tilbaka handfang (A) þegar búið er að stilla.

## Festing fyrir kopp

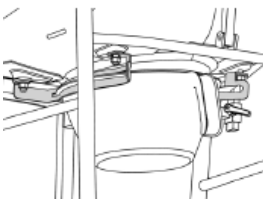

Koppur festist að aftanverðu sætiseiningu.


Bls. 2

# Hæðarstilling




1. Losað er um allar skrúfur (A) og þær teknar alveg út. Togað er í fætur til að hæðarstilli.
2. Þegar rétt hæð hefur verið fundin eru skrúfurnar aftur setta í og passa þarf að götin passi saman.
3. Passið að öll hjól séu í sömu hæð svo stólinn sé stöðugur.

## Fótstuðningur

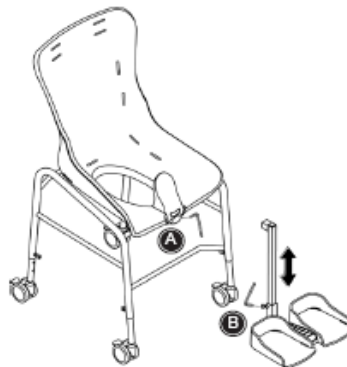

1. Byrjað er á því að losa um skrúfu (A). Efri hluti af lóðréttu stönginni er sett inn í festinguna.
2. Skrúfurnar eru aftur festar (A).
3. Losað er um skrúfur (B) sem eru við fótplöturnar og fótplatan er fest á stöngina neðanfrá. Þegar búið er að finna rétta hæð eru skrúfur (B) festar aftur.

## Festingar fyrir vesti /krossvesti

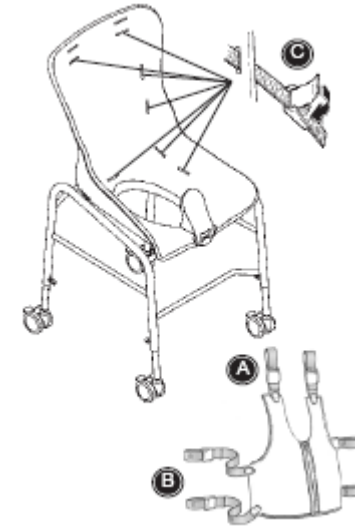

1. Böndin fyrir axlarstuðning (A) eru settar í gegnum efstu götin á bakeiningunni og eru festar að aftan með smellufestingu (C).
2. Böndin fyrir mjaðmastuðning (B) eru settar í gegnum götin til hliðanna og festast með smellufestingum.

## Klofkýll / svettivörn



Byrjað er á því að vippra fremri hluta klofkýls niður fyrir sætið. Þar á eftir aftara hluta klofkýls og þá er hann fastur.

Bls. 4