

## Gálgar burðargeta 75 kg.



Gálgi sem er stillanlegur í lengdina. Hægt að festa báðu megin við rúmið.

## Gálgi á rennisleða, auðvelt að stilla.



## Halogenljós, fánlegt



## Fjögurra stiga rúmstigi fánlegur



Bls. 5

## Hreinsun og viðhald

Til að tryggja góða endingu og gott útlit á sjúkrarúminu er reglulegt viðhald og þrif nauðsynlegt. Þrifið með rökum klút og mildri sápu. Notið ekki bleykiefni — spritt.

**Gott viðhald = góð ending !**

•Wissner Bosserhoff hannar og selur rúm og húsgögn og er eitt af stærstu framleiðendum í húsgögnum fyrir dvalarheimili og spítala í Evrópu.



## Vitalia Mobil sjúkrarúm



Bls. 6


Bls. 1

# Notkunarleiðbeiningar

## Vitalia Mobile



Lyftigeta rúms 205 kg  
Hámarksþyngd notanda 175 kg  
Hægt að fá tvískiptar hliðargrindur  
Hliðargrindur stillanlegar í fjórar hæðir  
Hægt að nota dýnu allt að 18 cm  
Lyftuhæð frá 33 cm til 77 cm  
Dýnumál 200 x 87 cm  
Gott úrval aukahluta fánlegt.

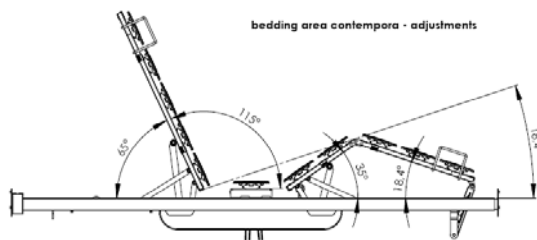

Bls. 2

# Handstýring




Ýtt er á þann hluta sem á að stilla (einn af þremur efstu tökkunum) og þá kemur grænt ljós...þá er ýtt á upp eða niður til að stilla þann hluta sem valinn er.

**Læsing:**  
Á baklið fjarstýringar er hægt að læsa stillimöguleikum ef æskilegt er að notandi stilli sjálfur ekki rúmið.  
**Notaður er lykill sem staðsettur er neðst á fjarstýringu.**

Bls. 3

## Hreyfanleiki og bremsur

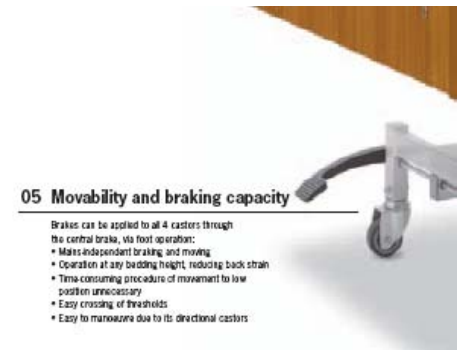

Samstilltar fótbremsur í þeirri vinnuhæð sem hentar hverjum og einum.  
Fer auðveldlega yfir þröskulda.  
Hjól létt og þægileg.

## Haldari fyrir þvagflösku fánlegur



## Haldari fyrir handstýringu fánlegur



Bls. 4