



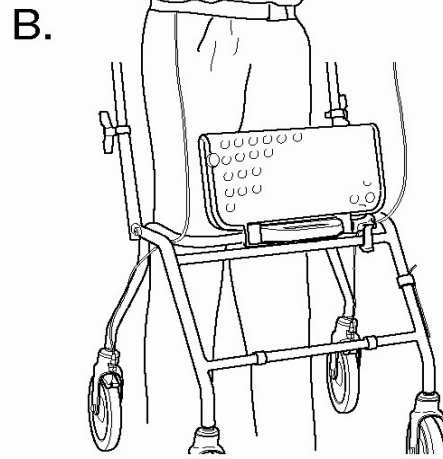

**NOTENDALEIÐBEININGAR
FYRIR
DOLOMITE ALPHA BASIC.**

Trönuhrauni 8
220 Hafnarfjörður
Sími 565 2885 / Fax 565 1423
stod@stod.is / www.stod.is

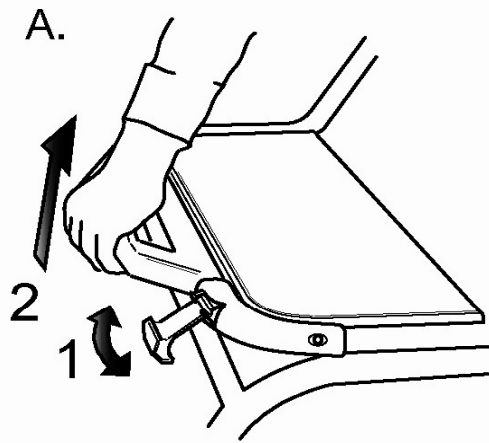

Grindin lögð saman/ sæti lyft upp.

A Losið öryggislásinn og takið í handfangið til þess að leggja grindina saman. Samanlögð/ sparar pláss.



Hentar þegar grindin er borin upp/niður stiga.

Ýtið handfanginu niður og og þrýstið á öryggislásinn með þumlinum.

Það heyrir smellur þegar grindin er komin í rétta stillingu.

Fullvissið ykkur um að öryggislásinn sé festur áður en lagt er af stað.

B. Það er hægt að taka sætið upp til þess að fá meira hreyfirými.

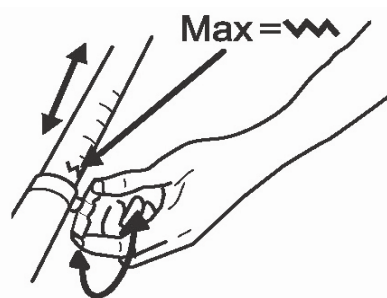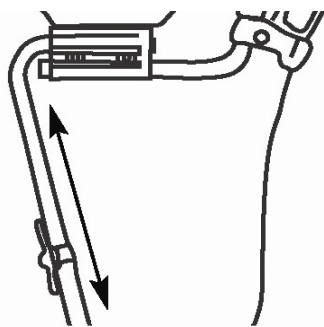


Hæðarstilling/stilling á framhandleggsstuðningi. Má eingöngu framkvæma af fagaðila.

Hæðarstilling/ stilling á framhandleggsstuðningi innávið.

Losið stilliskrúfuna. Stillið í æskilega hæð og stöðu. Herðið stilliskrúfuna.

Leyfilegur halli á framhandleggstuðningi er 20°, má ekki snúa út á við.

DOLOMITE ALPHA BASIC

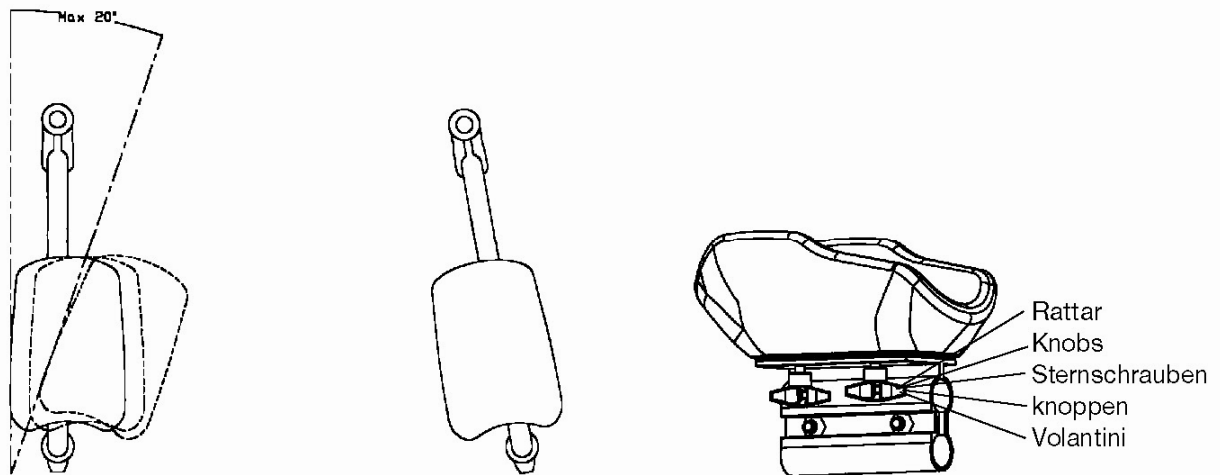


Stilling á framhandleggsstuðningi

Losið báðar skrúfurnar.

Færið handföngin í æskilega stöðu.


Herðið skrúfunar.

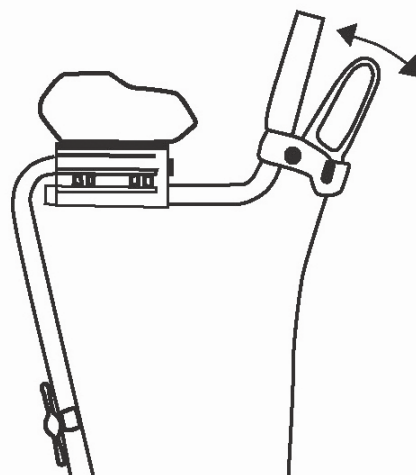


Stöðubremsa

Prýstið bremsuhandföngunum fram á við. Greinilegur smellur heyrir þegar bremsan er komin í rétta stöðu. **ATH** Hafið báðar bremsurnar læstar þegar grindin er kyrrstæð.


DOLOMITE ALPHA BASIC

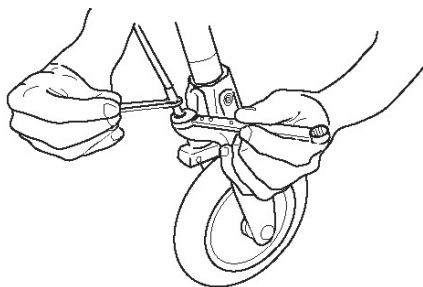

8, 10

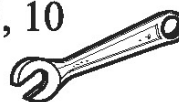


Ef bremsurnar eru slakar, stillið bremsuvírinn. Notið fastlykla nr 8 og 10.

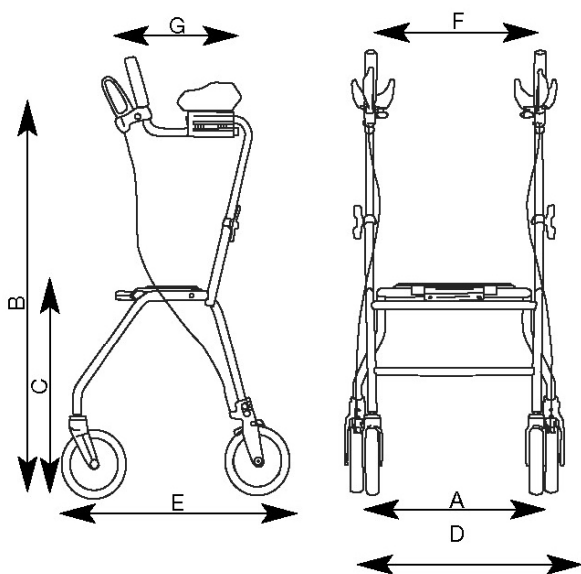

ALPHA BASIC


A	510
B	950-1190
C	620
D	650
E	700
F	430
G	290-330

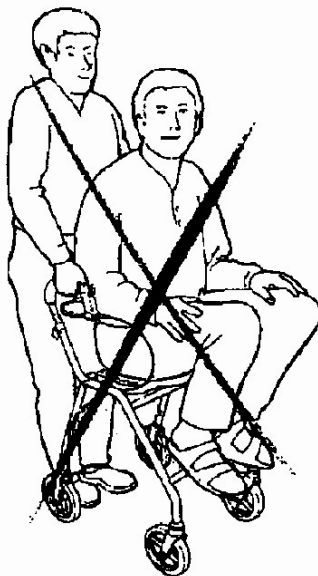

Það má EKKI standa á göngurgrindinni eða nota hana til þess að flytja á henni fólk.

DOLOMITE ALPHA BASIC

<2001-08

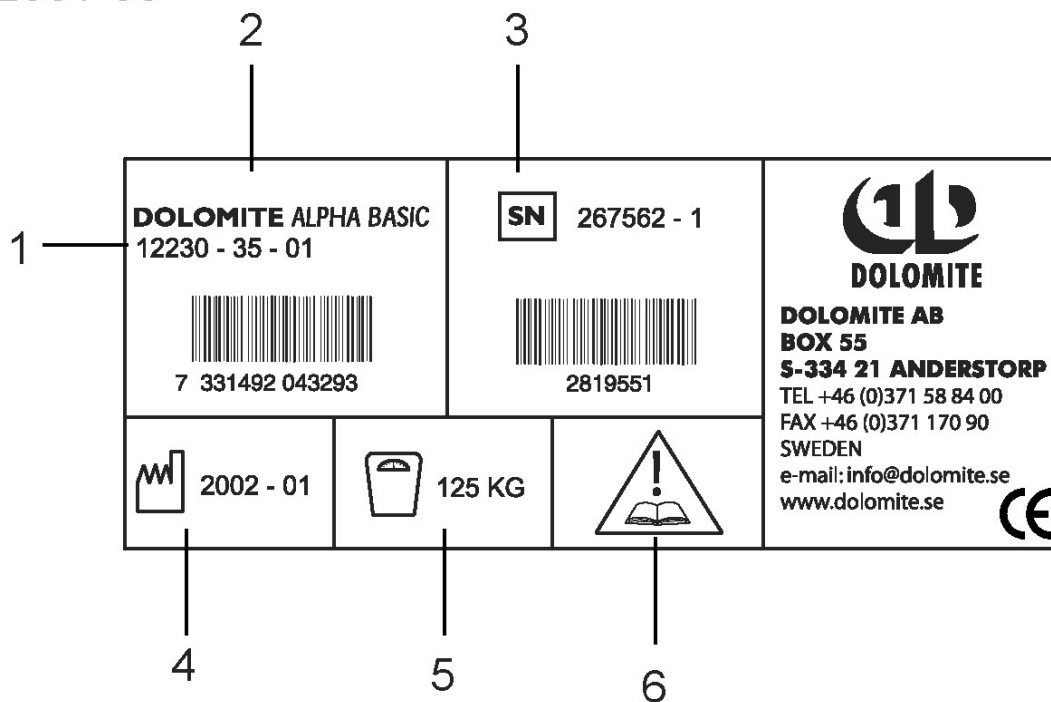

- 1: Vörunúmer
- 2: Nafn
- 3: Serialnúmer
- 4: Framleiðsluár
- 5: Hámarksþyngd notanda
- 6: ATH sjá notkunarleiðbeiningar